



QuickFit® ريبك طابر مقط ايوتحم

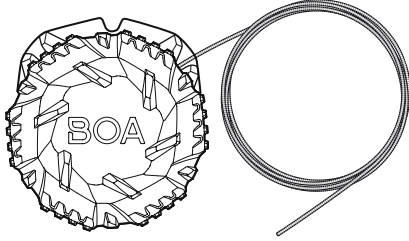


BOA® M4 صارقاً
(دع 2) رتم 1.3 لوطب طابر عم

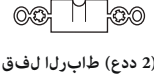

(دع 2) طابر لال فلق




ماشرب ريم اسم
(ءاطغ عم آرام سم 32)

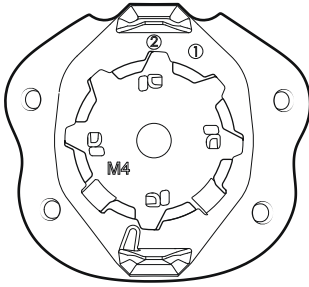

(دع 2) M4 صارقاً ءاطغ



طابر ةلدأ
Quick Lace (دع 20)

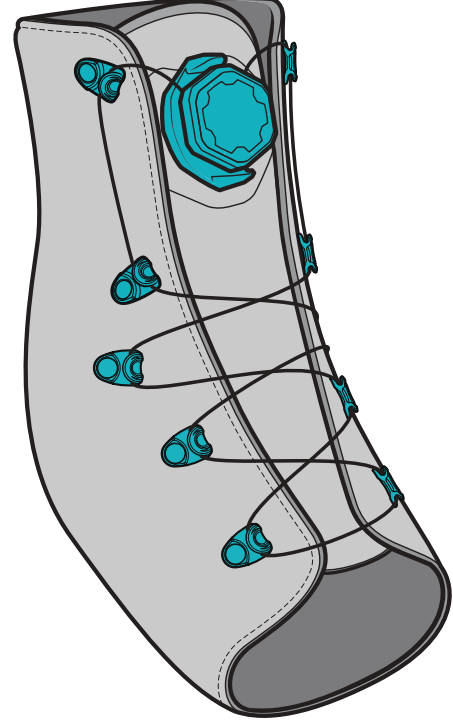

هيبنت



لك آتي دق. صصختم ينفة طساوب هبكيكرت بجي: هيبنت
هدش يدؤي دق. لقالأ لعل أي رهش هصحفب حصنئي. طابر لال
يضرم لال مدختسئي ال. ةي وم دلل ةرودل فعض لال دئازم كحإب
طابر لال ءاقبإ بجي. باصعألأ يف لك اشم نم نوناعي ني ذل
ءداحل فاولح لنع آدي عيب

يرخأ تاغلب تاهيبنت لال لعل عالطال
clickmedical.co/advisories

ببكيكرت لال تاداشرإ:

لمعل يرخأ ةادأ ي أو ةصوب 1/8 باقثم، QuickFit® ةادأ مدختسا
ءبولطم لال بوقثلال

مق Quick Lace، طابر ةلدأل ةدوجوم بوقثلال مدختسا لال
نامضل تاورعل نم ةيكيكيتسالبلال وأ ةي ندع لال تاقولح لال ةلازب
مكحإب ماشرب لال ريم اسم تيبثت

ءمءالم لال نم ققحت لال أيودي ماشرب لال ريم اسم تيبثت نكم ي
لعل ةريبك قالغ! ةوق قيبطت لبقت اهتيبثت بجي نكلو
ةيوازب ماشرب لال ريم اسم لعل طغضا. ةركبلال مدختسا باطابر لال
يدؤيس ةيوازب طغض لال؛ يرخأ ققيرط ي أو QuickFit® ةادأ. ةجرد 90
ريم اسم لال ديغ تيبثت لال

ناسل لال نم ةناتم / آكسم رثكال ءنجل لال لعل صرقلال تَبث

ءاب يصوم لال تاودأل:

- ةادأ QuickFit®
- دي دحت ملق -
- كلاس ءعطاق -

نامضال:

www.clickmedical.co/terms/#warranty

ءدحت لال تالاولال ءالمع

ةرشابم Click Medical ةكش رع عم اولصاوت

Help@ClickMedical.co • ةءع اسم لال طخ +1 970 670 7012

نوي لودل ءالمع لال


ليحم لال عزوم لال عم لالصاوت لال يجري




م اشر ب الاء اطغ لى ل ع طغ ضا ب.
ط ابر ل اللى ل د لى ل ع أ ي و ث ن أ ل
ت ي ب ث م ع ، ع ي ر س ل
ء ا ذ ح ل لى ل ع لى ل د ل ل

ط ابر ل الء ل د أ ت ي ب ث ت ب م ق أ.
م اشر ب الاء ل ا خ د ا ب ع ي ر س ل
ر ب ع و ز ا ه ج ل ل ا خ ا د ن م ي ر ك ذ ل
ع ي ر س ل ط ابر ل اللى ل د

2

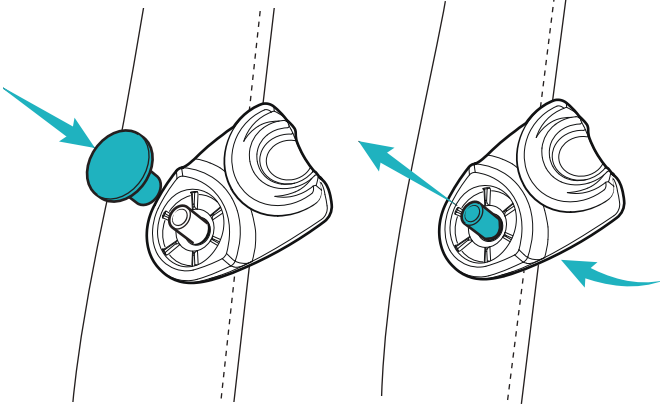


1 بوقث لال ب قث . ب ي ك ر ت لال ت ا د ا ش ر ل ا م ا د خ ت س ا ب لى ل د ل ل ع ق ا و م د د ح
ة ا د أ ي ف ة ص و ب 1/8 ب ق ث لال ر ا ي خ م ا د خ ت س ا ب QuickFit™.

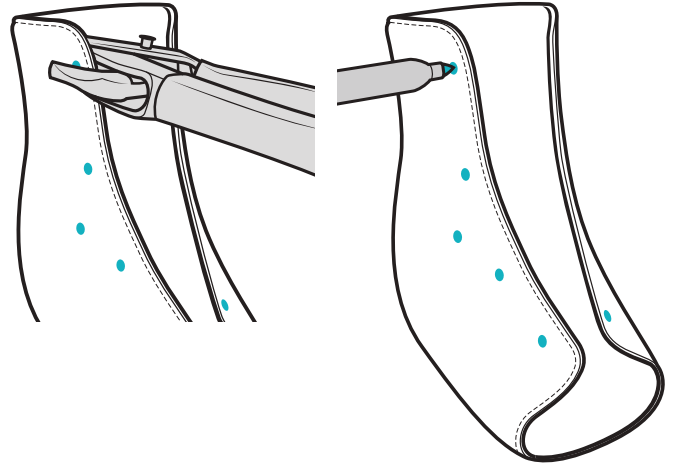


4 ن ا س ل ل اللى ل ع لى ل ب م س 1 ة ف ا س م ك ر ت ا . ص ر ق ل ل ع ق و م د د ح
ة ب ر أ ل ب و ق ث لال ع ق ا و م د د ح . ف ا ل غ ل لى ل ع أ و

4

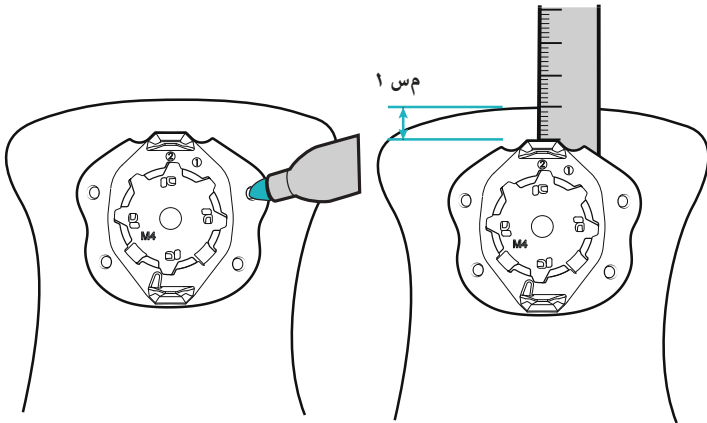


3 م اشر ب الاء ت ب ث ، لى ل د ل ل ع ض و م ن م د ك أ ت لال د ع ب
ت ي ب ث ت لال ة ا د أ م ا د خ ت س ا ب
ة ل د أ ل ع ي م ج ل ت ا و ط خ لال ه ذ ه ر ر ك

3

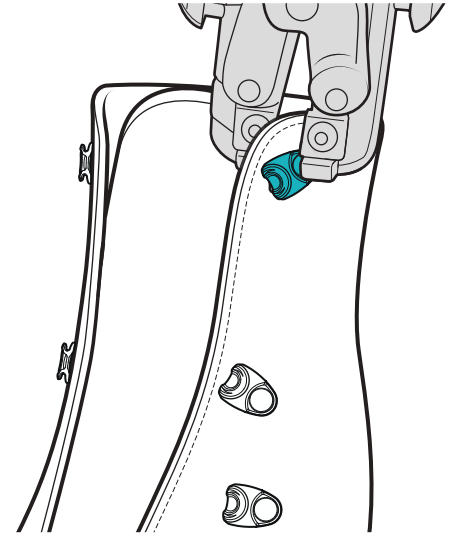


6 ا م ك ت ي ب ث ت لال ر ي م ا س م م د خ ت س ا . ن ا س ل ل اللى ل ع ص ر ق ل ل ا ط غ ت ب ث
ه ت ب ث ، ع ض و لال ن ع أ ي ض ا ر ت ن ك ا ذ ا ٢ . ة و ط خ لال ي ف ح ض و م و ه
ة ا د أ م ا د خ ت س ا ب QuickFit™.

6

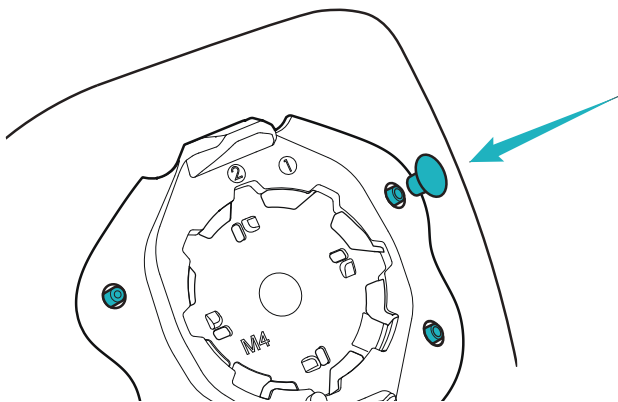


5 QuickFit™ ة ا د أ ي ف ة ص و ب 1/8 ب ق ث لال ر ا ي خ م ا د خ ت س ا ب ة ح ت ف ب ق ث ا .


5

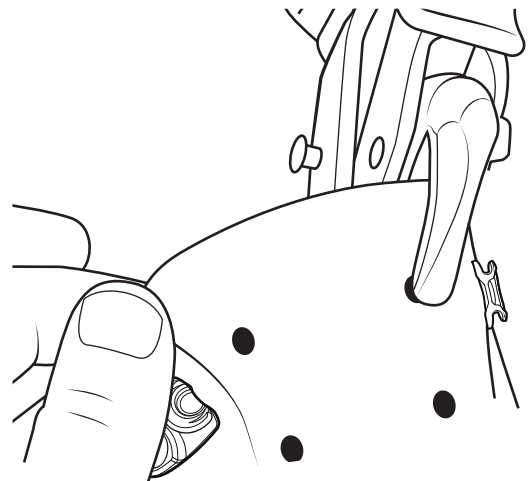


7. حضوم وه امك تاهج او مل ربع طابردلا ررم

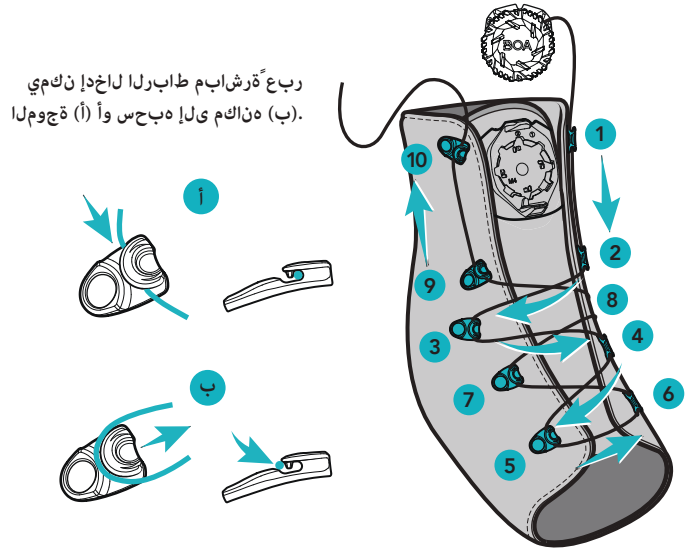


9. قوف، حوت فم ل طابردلا ذف نم يف طابردلا نم رحل فرطلا لخدأ ربع طابردلا عفدا مٲ. اه لفسأ سولو، ءيكي تسالبل ءفاحل لفسأل نم جرخي ىتح صرقلا

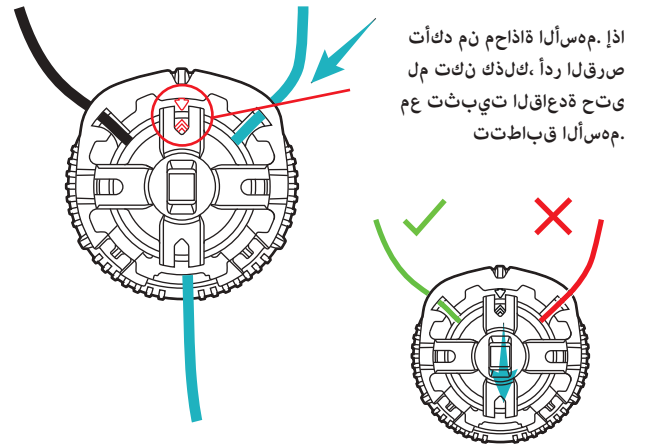


11. لىع "1" مقرلا عم صرقلا ءءءاق يف ءوومل قشلا ءءءءمب مق هءءء سك صرقلا رءأ. فالغل لخد صرقلا عفءا مٲ، صرقلا فالغل قوطل لىع "3" مقرلا لىل قشلا ريشى ىتح ءءءسلل براقء

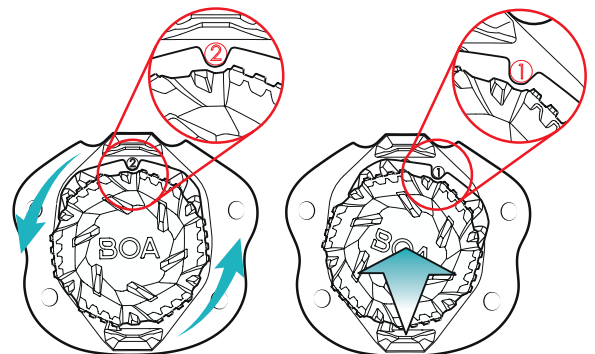

8. طابردلا نم مس 15 يلاوح سقو عطاقتلا طاقن نم ءئازل طابردلا بحسا طابردلا صق مٲ ءءءل عض. صرقلا نم يف لخلل ءءءل لىل هءوم رءأ نم كءسل ءءءاق مءءءءء

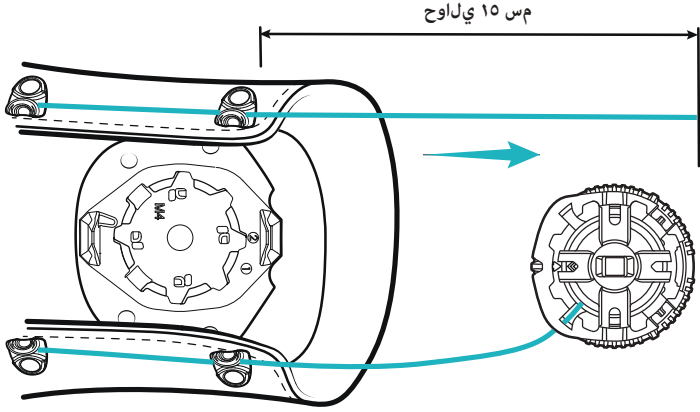

10. فرطلا نم مس 5 يلاوح كرتا و (أ) هءءء حضوم وه امك طابردلا لفق ررم. يف طابردلا لفق لفضا (ب). فرطلا نم مس 5 كرت عم آءي ءءءءل ءءء مس ءءء لىل ءءءءل بحسا مٲ، (ء) ءءءءل نم ءءءءملا ءءءل (ء). مءءءل صرقلا

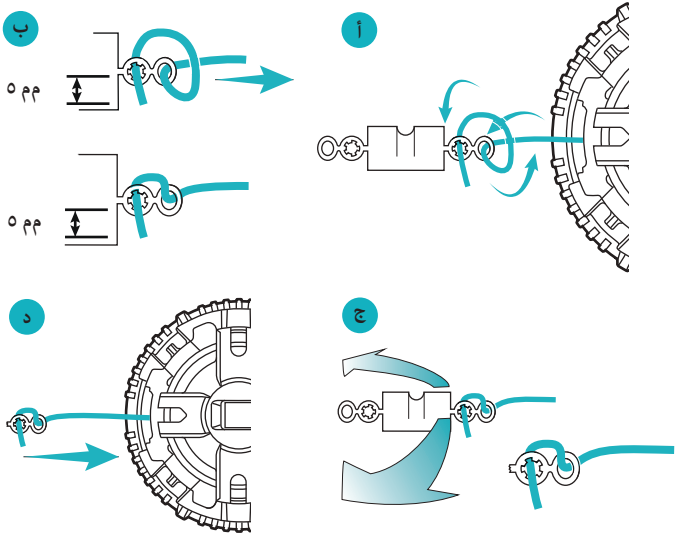

12. ءءءل ءءءسل براقء هءءءا يف صرقلا رءأ. مءءل عم رءءءا كف نمكي. أمءء هري رءءل ءءءل صرقلا بحسا مٲ، طابردلا ءءءء هءءل و ءءءءرا لىل ءءل نم طابردلا

