




**RevoFit™**  
by CLICK  
Das Ersetzen von Schnüren


PK0060-000-10

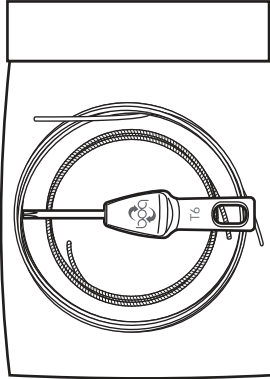

Ersatzschnüre für alle RevoFit™-Kits

Für Hilfe und Videoanleitungen besuchen Sie [clickmedical.co/rfkb](http://clickmedical.co/rfkb)

**Kit Contents:**

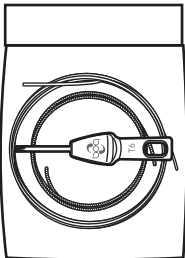

- 1 x Ersatzschnüre
- 1 x Schnürsenkelvorschub
- 1 x T6-Werkzeug



**GARANTIE:**

[www.clickmedical.co/terms/#warranty](http://www.clickmedical.co/terms/#warranty)

**U.S.-Kunden:**

Kontaktieren Sie Click Medical direkt:  
Help@ClickMedical.co • Telefonberatung: +1 970 670 7012

**Internationale Kunden:**

Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler vor Ort



**MDSS GmbH**

Schiffgraben 41  
30175 Hannover,  
Germany




Click Medical, LLC  
1205 Hilltop Parkway, W101  
Steamboat Springs, CO,  
80487, USA  
+1-970-670-7012

Überarbeitet 2019

**1 Entfernen Sie die Rolle.**

- a. Öffnen Sie die Spule durch Ziehen.
- b. Drücken Sie die Lasche mit Hilfe des T6-Werkzeuges nach innen.
- c. Drehen Sie das Spulengehäuse gleichzeitig 1/4-Umdrehung im Uhrzeigersinn.


Drücken Sie Richtung Mitte der Rolle

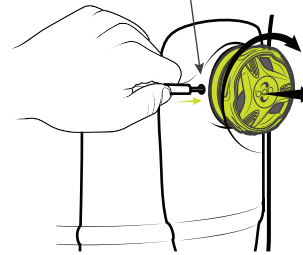

Drücken Sie Richtung Mitte der Rolle, nicht der Spule


Ziehen Sie an der Spule, um diese zu öffnen

**Lösen Sie die Laschenposition**

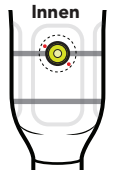

Entweder bei 4 Uhr oder 11 Uhr


**Fernbedienung**

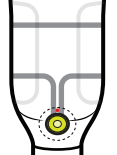


Stets innerhalb der Röhre

**Sollte die Halterung nicht vorgebohrt sein, benutzen Sie eine Zange zum Entfernen der Rolle.**


- 1 Platzieren Sie den Reiter (siehe Abbildung unten). Nun auf das Rollengehäuse aufsetzen, mit einer Flachrundzange.

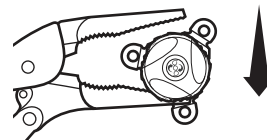


- 2 Drehen Sie die Rolle 5 mm und ziehen Sie sie dann nach außen, um sie zu entfernen. Schneiden Sie eine Schnüre zu und ziehen sie zum Entfernen.

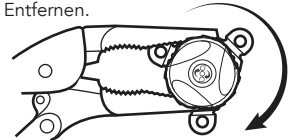

**2 Entfernen Sie die alte Schnüre.**

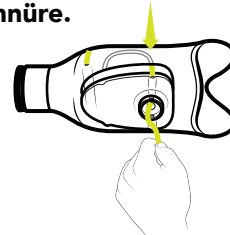


**3 Säubern Sie die Gänge.**

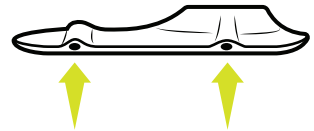

Überprüfen Sie die Löcher auf Rückstände. Überprüfen Sie, ob es raue Kanten oder Sand gibt, sollte es sich rau anfühlen.

**4 Führen Sie die neue Schnüre in die Halterung ein.**

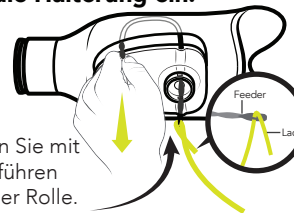

Beginnen Sie mit dem Einführen mittels der Rolle.



**5 Führen Sie die Schnüre durch die Spule.**



Führen Sie die Schnüre in die kleine Öffnung ein und durch die große Öffnung aus.


Der Knoten befindet sich innerhalb der großen Öffnung.

**6 Machen Sie einen Knoten.**

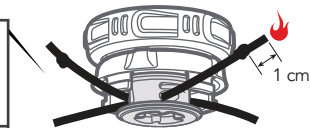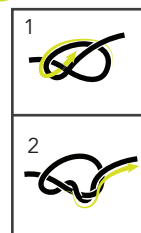


Machen Sie doppelte Überhandknoten an jedem Ende. Veröden Sie die Enden mit einem Feuerzeug und platzieren Sie die Knoten in die Aussparungen.

Lassen Sie je 8 cm Schnürband an jedem Ende übrig, bevor Sie die Knoten machen.

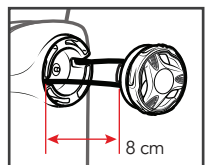

**7 Installieren Sie die Rolle.**

Fügen Sie die Rolle vollständig in die Halterungsplatte ein und drehen Sie dann gegen den Uhrzeigersinn bis zum Einrasten.

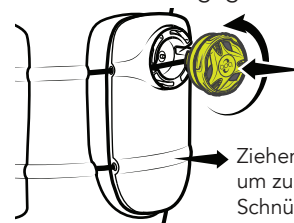

Ziehen Sie die Platte heraus, um zu verhindern, dass das Schnürband durchstochen wird.



Ziehen Sie es auf und testen Sie

## Problemlösung RevoFit™

Verhindern Sie den Auswechselbedarf der Rollen und Schnüren, indem Sie die Dicke der Polsterung optimieren und auf scharfe Kanten und raue Oberflächen achten.

### Optimieren der Polsterung

Nutzen Sie Polsterstärke, Material und Form, um Druck und Passform anzupassen.

#### Polstermaterial:


Mittelstarke Polsterung (Grad: 35)

#### Polsterstärke:

Durchschnittlich 3/16" (4,75 mm)


#### Polsterform:

Leicht konvexe Form für die erleichterte Druckanpassung.


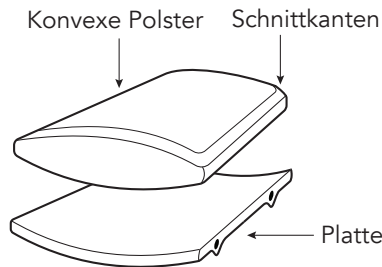


### Überprüfen Sie die richtige Polsterstärke

KORREKT - das Polster hat die angemessene Stärke, wenn die Platte über der Halterung sitzt und es sich für den Patienten bequem anfühlt.

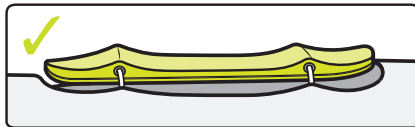

NICHT KORREKT - Die Polsterung ist zu dünn, wenn die Platte ebenmäßig zur Halterung ist.

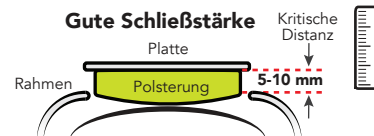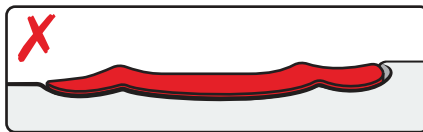

### Überprüfen Sie das System auf scharfe Kanten und raue Stellen.




**Spülen Sie das System aus.** Dieses Produkt ist wasserfest und tauchbar. Spülen Sie es mit klarem Wasser ab, nachdem Sie im Salzwasser, Sand oder Schlamm waren.




**Säubern Sie die Gänge.** Überprüfen Sie das Rollengehäuse auf überschüssige Leitungen oder raue Stellen.

1. Schneiden Sie die Leitungsenden ab.
2. Entfernen Sie alle raue Stellen.

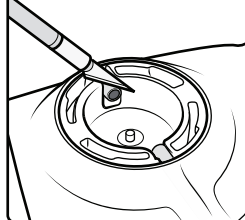

**Überprüfen Sie, ob es raue Kanten gibt.**

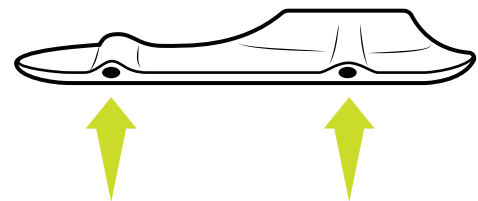

Entfernen Sie Sand mit der Hand, bis die Oberfläche sehr weich ist.

## Warnung und Gewichtsbeschränkung



Bitte nicht für Patienten mit Neuropathie oder Durchblutungsstörungen benutzen.

Verarbeitung bitte nur von speziell für RevoFit™-Systeme geschulte Personen. Die Fasern werden sich abnutzen; deshalb bitte regelmäßig kontrollieren und ersetzen.

Patientengewichtsbegrenzung beträgt 100 kg pro RevoFit™-System, das auf der Halterung installiert wurde. Siehe Ratschläge in weiteren Sprachen: [clickmedical.co/advisories](http://clickmedical.co/advisories)