


### Contenu du kit RevoLock® V2 & V3 BOA Dial et lacet HC



BOA® Lanyard V2 Dial

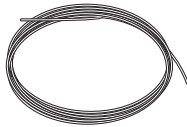

Lacet



Alimentateur de lacets

Si le dispositif utilise le "port A" pour acheminer le lacet jusqu'à l'extrémité distale de l'emboîture, vous aurez besoin de l'enrouleur "Port A".

Veuillez contacter votre distributeur pour recevoir cette pièce, RP-310A.



#### GARANTIE:

Pour obtenir des informations sur la garantie de tous les produits Click Medical  
<https://clickmedical.co/terms/#warranty>

#### Clients américains :

Contact Help@ClickMedical.co  
Tél : +1-970-670-7012

#### Clients internationaux :

Veillez contacter votre distributeur local.

Les produits Click Medical sont protégés par des brevets. Pour une liste complète, voir [www.clickmedical.co/patents](http://www.clickmedical.co/patents)

Revised 2023



#### Avis

Doit être installé par un professionnel formé à la fabrication de RevoLock. Le lacet s'use. Au minimum, inspectez-le tous les mois et remplacez-le tous les six mois.

La perte de la suspension peut se produire en cas de défaillance du lacet. Ne pas utiliser chez les patients souffrant de problèmes nerveux. Tenir le lacet à l'écart des flammes nues et des arêtes tranchantes. Fixer l'insert à la doublure avant de tendre le système.

Voir les avis dans d'autres langues : [clickmedical.co/advisories](http://clickmedical.co/advisories)

**UK REP**

MDSS-UK RP LIMITED, 6 Wilmslow Road  
Rusholme, M14 5TP Manchester  
Royaume-Uni

**CH REP**

MDSS CH GmbH, Laurenzvorstadt 61  
5000 Aarau, Suisse

**MD**

MDSS GmbH, Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Allemagne

**EC REP**




Click Medical, LLC, 1205 Hilltop Parkway,  
Steamboat Springs, CO 80487, USA +1-970-670-7012

Pour une formation vidéo sur l'ajustabilité de Click et le fonctionnement de RevoLock, visitez le site

[www.clickacademy.co](http://www.clickacademy.co).


### 1 Retirer le dial.

- Localisez l'insert métallique.
- Insérez un petit tournevis à tête plate entre l'insert métallique et le corps du dial.
- Faire doucement levier pour soulever l'enrouleur.

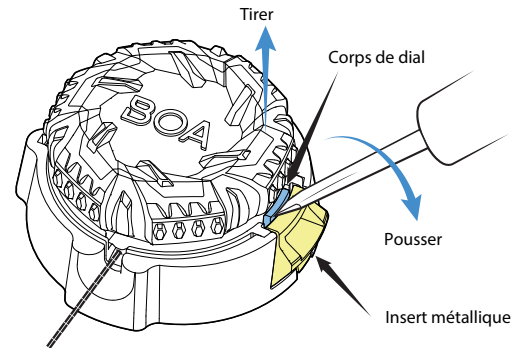


### 2 Retirer le lacet.


- S'assurer que le dial est ouvert en le tirant vers le haut.

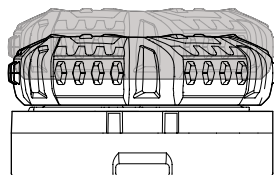

- Retirer tout le lacet restant du dial.

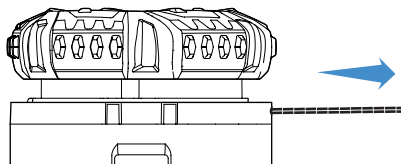


- Localisez la grande ouverture de sortie du lacet dans la base du dial. Accrochez la boucle du lacet dans le dial à l'aide d'un cure-dent et tirez le lacet hors du dial

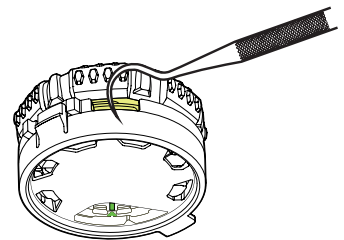

- Couper le lacet et le retirer du dial. Retirez ensuite le lacet de l'appareil. Confirmez que vous utilisez


l'enrouleur de remplacement correct en identifiant le C sur la partie inférieure du dial.

Si l'enrouleur porte un "A" sur le fond ou utilise le "port de lacet A" pour acheminer le lacet vers l'extrémité distale de l'emboîture, vous avez besoin d'un enrouleur "Port A".

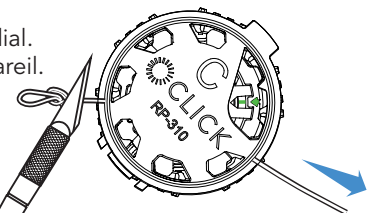

### 3 Lacey le système.



À l'aide de l'alimentateur de lacets, acheminer le lacet depuis le collier du dial, dans la tubulure, à travers le boîtier distal jusqu'à l'emboîture.

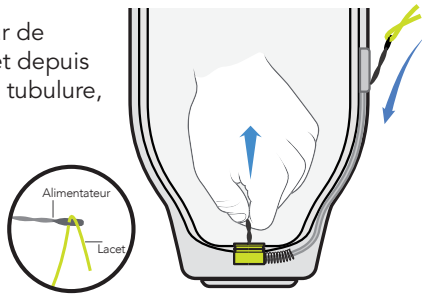


### 4 Lacey le dial. a) Préparer le dial pour le laçage.

1 S'assurer que le dial est enclenché en le poussant vers le bas.


2 Retournez le dial et assurez-vous que la marque verte est alignée avec la flèche verte. Si ce n'est pas le cas, tenez la base et tournez le dial jusqu'à ce que les marques soient alignées.

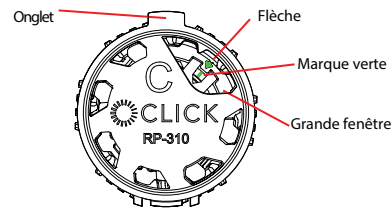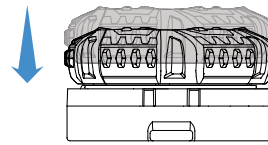

### b) Localisez les orifices de laçage.

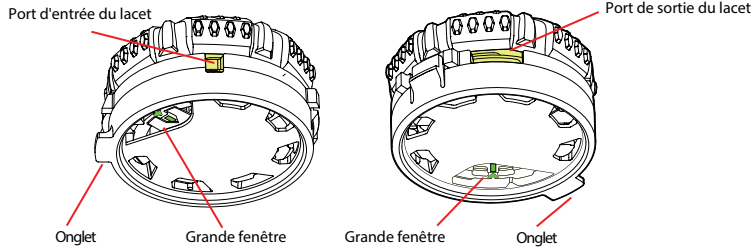

c) Faire passer le lacet par l'orifice d'entrée et le faire sortir par l'orifice de sortie du lacet situé de l'autre côté du dial.

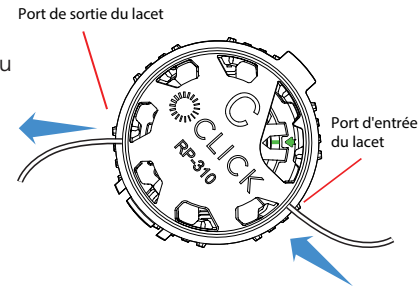



d) Faire un nœud plat.

1 Faites une boucle.


2 Faites un nœud plat avec la boucle.

3 Tirer sur le nœud pour le serrer. La boucle du nœud doit être d'environ 1 cm.

4 Couper l'extrémité.

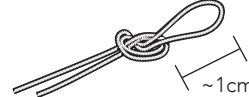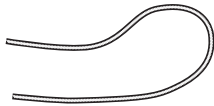




e) Tirer la boucle dans le dial pour faire le nœud.

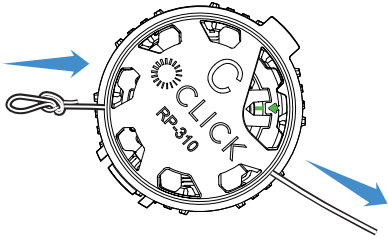

### 5 Installer le dial.


a) Insérer le pied du dial dans le collier.

b) Enfoncez fermement l'enrouleur dans le collier (vous devez entendre un "clac" lorsqu'il est bien fixé).

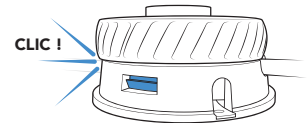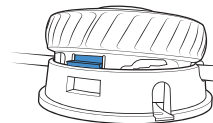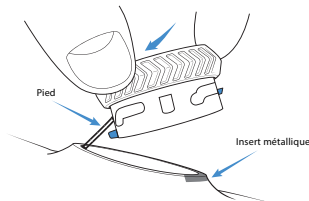


### 6 Déterminer la longueur du lacet.

Déterminer la quantité de lacet nécessaire pour dépasser l'emboîture et la fixer à la doublure et à l'insert fileté.

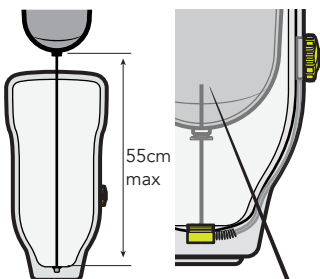

À l'aide de l'alimentateur de lacets, insérer le lacet et faire un double nœud plat.

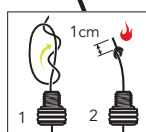


Remarque: la longueur maximale du lacet ne doit pas dépasser 55 cm.

### 7 Test de fonctionnement.

- Fixer l'insert fileté à la doublure.
- Enrouler le lacet.
- Tirer le dial vers l'extérieur pour le débloquer.
- Retirer la doublure et le lacet de l'emboîture.
- Enrouler à nouveau le lacet.

#### Notes:

- Inspect lace routinely for signs of fraying or fatigue. Inspect régulièrement le lacet pour détecter tout signe d'effilochage ou de fatigue.
- Remplacer le lacet tous les 6 mois.
- Tenir le lacet à l'écart des flammes nues.

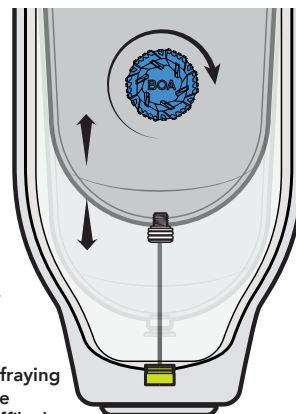

✓ Félicitations ! Vous avez terminé !

