



CLICK MEDICAL

RevoLock®

V2 & V3 BOA® Dial und HC Lace Kit

Zur Verwendung mit Port C Lace Ausgang

RP-310



GARANTIE:

Informationen zur Garantie für alle Click Medical Produkte finden Sie unter: <https://clickmedical.co/terms/#warranty>

U.S. Kunden :

Kontakt: Help@ClickMedical.co


Telefon: +1-970-670-7012

Internationale Kunden:

Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.

Die Produkte von Click Medical sind durch Patente geschützt. Eine vollständige Liste finden Sie unter www.clickmedical.co/patents

Überarbeitet 2023

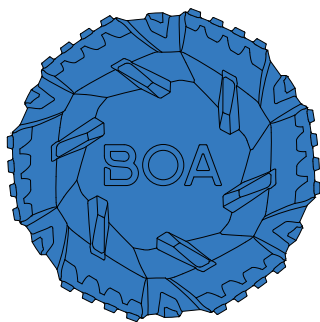

RevoLock® V2 & V3 BOA Lanyard und HC Lace Kit Inhalt



BOA® Lanyard V2 Einstellrad



Schnur



Schnurzuführung

Wenn das Gerät den "A Lace Port" verwendet, um die Schnur zum distalen Ende des Schafts zu führen, benötigen Sie eine "Port A" Rolle.

Wenden Sie sich an Ihren Händler, um dieses Teil zu erhalten, RP-310A.



UK REP

MDSS-UK RP LIMITED, 6 Wilmslow Road
Rusholme, M14 5TP Manchester
United Kingdom

CH REP

MDSS CH GmbH, Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Schweiz

MD

MDSS GmbH, Schiffgraben 41
30175 Hannover, Deutschland

EC REP




Click Medical, LLC, 1205 Hilltop Parkway, W101
Steamboat Springs, CO 80487, USA +1-970-670-7012

Schulungsvideos zur Click Adjustability und RevoLock Bedienung finden Sie unter www.clickacademy.co


1 Einstellrad entfernen

- Den Metalleinsatz ausfindig machen.
- Führen Sie einen kleinen Schlitzschraubendreher zwischen dem Metalleinsatz und dem Einstellradkörper ein.
- Die Spule vorsichtig nach oben anheben.

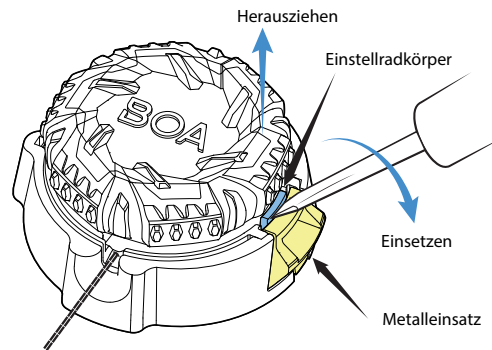


2 Schnur entfernen


- Vergewissern Sie sich, dass das Einstellrad geöffnet ist, indem Sie es nach oben ziehen.

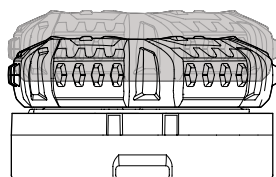


- Die gesamte Schnur aus dem Einstellrad herausziehen.

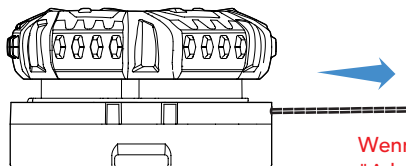

- Die große Öffnung für den Austritt der Schnur an der Unterseite des Einstellrads ausfindig machen. Die Schlaufe der Schnur mit einem Zahnstocher in das Einstellrad einhaken und der Schnur aus dem Einstellrad herausziehen.

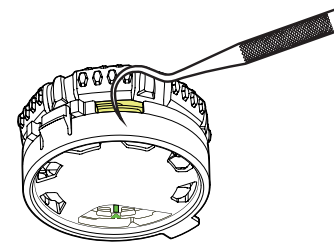

- Die Schnur abschneiden und aus dem Einstellrad herausziehen. Dann die Schnur aus dem Gerät entfernen.

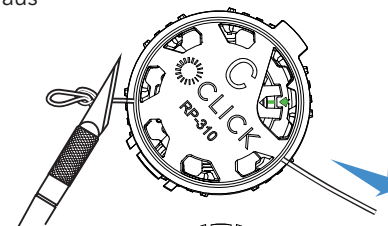


Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Ersatzspule verwenden, indem Sie auf das "C" auf der Unterseite des Einstellrads achten.

Wenn die Spule ein "A" auf der Unterseite hat, dann den "A lace port" verwendet, um die Schnur zum distalen Ende des Schafts zu führen, benötigen Sie eine "Port A" Spule. 3.




3 Schnüren Sie das System.

Führen Sie die Schnur mit dem Schnurvorschub vom Skalering in den Schlauch und durch das distale Gehäuse in den Schaft

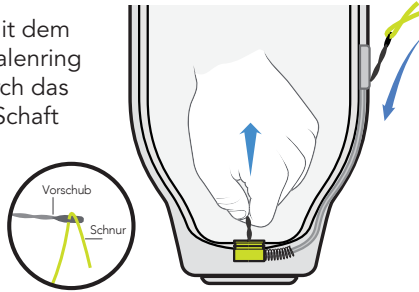


4 das Einstellrad wird geschnürt.


a) Bereiten Sie das Einstellrad für die Verschnürung vor.

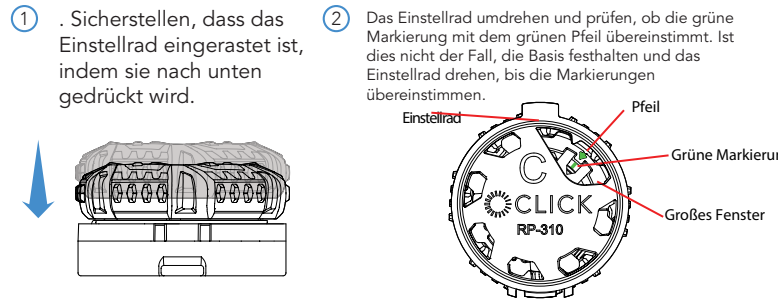


b) Suchen Sie die Öffnungen für die Schnur.

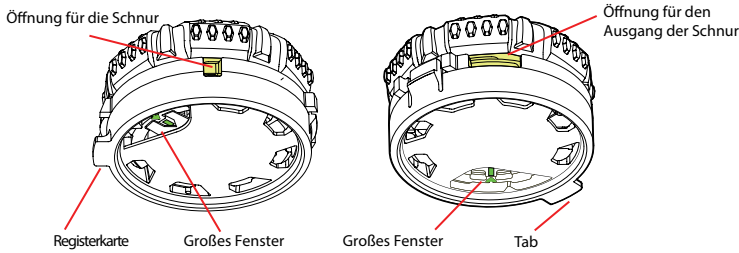

c) Führen Sie die Schnur durch die Eintrittsöffnung und aus der Austrittsöffnung auf der gegenüberliegenden Seite des Einstellrads heraus.

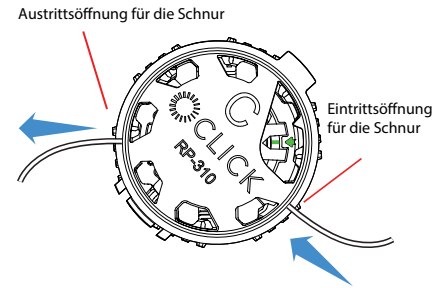

d) Die Schnur mit einem Überhandknoten binden




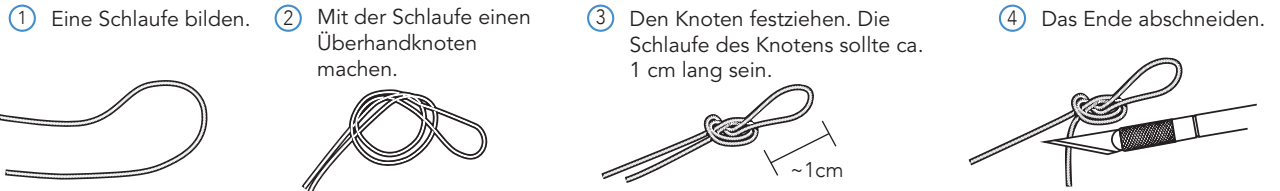


e) Die Schlaufe in das Einstellrad ziehen, um den Knoten zu fixieren.

5 Das Einstellrad befestigen.


a) Den Fuß dem Einstellrad in den Kragen stecken.

b) Die Spule fest in den Kragen drücken (es sollte ein "Klick" zu hören sein, wenn sie fest sitzt).

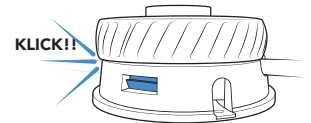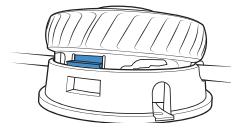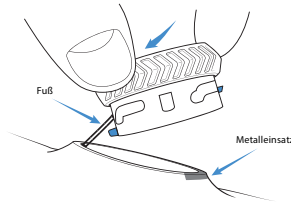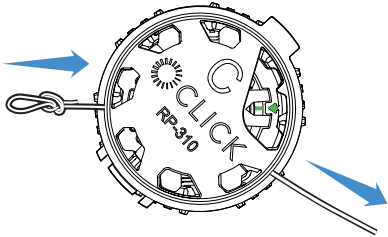


6 Länge der Schnur

Bestimmen Sie, wie viel Schnur benötigt wird, um über den Schaft hinauszuragen und am Innenschutz und am Gewindeeinsatz befestigt zu werden.

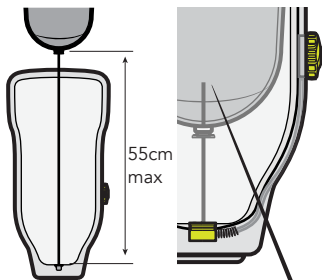

Einen Schnurführer verwenden, der die Schnur einführt und einen doppelten Überhandknoten macht.

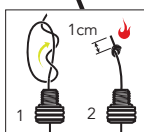


Hinweis: Die maximale Länge der Schnur darf 55 cm nicht überschreiten.

7 Funktion prüfen.

- Gewindeeinsatz an der Einlage befestigen.
- Die Schnur aufwickeln
- Zum Lösen den Gewindeeinsatz herausziehen
- Einsatz und Schnur aus der Hülse ziehen.
- Die Schnur wieder aufwickeln.

Hinweise :

- Überprüfen Sie die Schnur regelmäßig auf Anzeichen von Ausfransen oder Ermüdung
- Die Schnur alle 6 Monate austauschen.
- Die Schnur von offenem Feuer fernhalten.

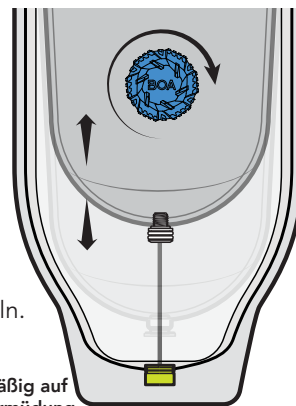

✓ Herzlichen Glückwunsch! Sie sind fertig!

