


RevoLock® V2 & V3 HC Faden-Kit Inhalt:

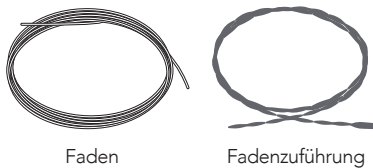

Faden

Fadenzuführung

Wenn das Gerät den "A Lace Port" verwendet, um den Faden zum distalen Ende des Schafts zu führen, verwenden Sie die Anleitung für Port A. 1.



GARANTIE:

www.clickmedical.co/terms/#warranty

U.S. Kunden :

Bitte wenden Sie sich direkt an
Click Medical Help@ClickMedical.co

Hilfe-Hotline: +1 970 670 7012

Internationale Kunden :

Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Händler

Die Produkte von Click Medical

sind durch Patente geschützt.

Eine vollständige

Liste finden Sie unter

www.clickmedical.co/patents

Überarbeitet 2023



Hinweis

Muss von einem in RevoLock geschulten Fachmann angebracht werden.

Der Faden nutzt sich ab. Mindestens monatlich überprüfen und alle 6

Monate ersetzen. Wenn der Faden reißt, kann die Aufhängung verloren

gehen. Nicht bei Patienten mit Nervenproblemen verwenden. Den Faden

von offenen Flammen und scharfen Kanten fernhalten.

Die Einlage vor dem Spannen des Systems am Liner befestigen.

Siehe Gebrauchsanweisung in anderen Sprachen:

clickmedical.co/advisories

UK REP

MDSS-UK RP LIMITED, 6 Wilmslow Road
Rusholme, M14 5TP Manchester
Großbritannien

CH REP

MDSS CH GmbH, Laurenzvorstadt 61
5000 Aarau, Schweiz

MD

MDSS GmbH, Schiffgraben 41
30175 Hannover, Deutschland

EC REP




Click Medical, LLC, 1205 Hilltop Parkway, W101
Steamboat Springs, CO 80487, USA +1-970-670-7012

Schulungsvideos zur Click Adjustability
und RevoLock Bedienung sind unter
www.clickacademy.co verfügbar


1 . Entfernen Sie das Einstellrad.

- Suchen Sie den Metalleinsatz.
- Einen kleinen Schlitzschraubendreher zwischen Metalleinsatz und Einstellrad einführen.
- Die Spule vorsichtig nach oben anheben

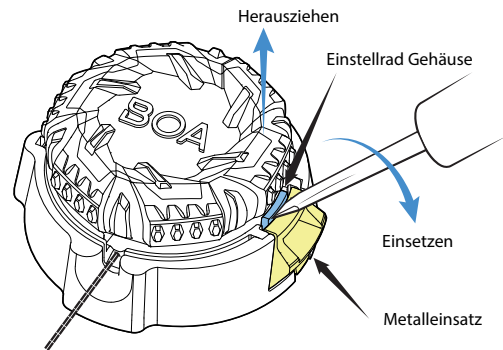


2 Faden entfernen.


- Sicherstellen, dass das Einstellrad geöffnet ist, indem es nach oben gezogen wird.

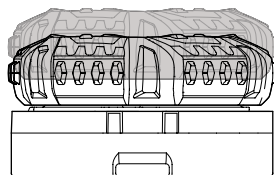


- Ziehen Sie den restlichen Faden aus dem Einstellrad.

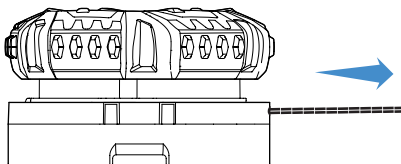

- Suchen Sie die große Öffnung für den Fadenaustritt im Einstellrad. Haken Sie die Schlaufe des Fadens mit einem Zahnstocher im Einstellrad ein und ziehen Sie den Faden aus dem Einstellrad.

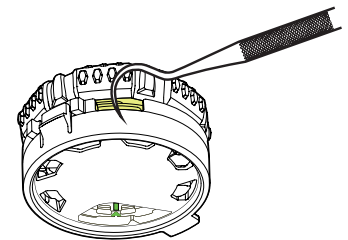

- Den Faden abschneiden und aus dem Einstellrad herausziehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Ersatzspule verwenden, indem Sie auf die Markierung "C" auf der Unterseite des Einstellrads achten.

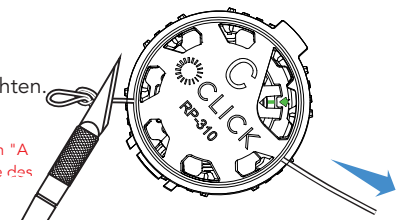


Wenn die Spule ein "A" auf der Unterseite hat oder den "A lace port" verwendet, um den Faden zum distalen Ende des Schafts zu führen, benötigen Sie eine "Port A" Spule. Verwenden Sie die Port A-Anleitung, die diesem Kit beiliegt.



3 Faden einfädeln.



Den Faden mit Hilfe des Handrads in den Schlauch und durch das distale Gehäuse in den Schaft einführen.

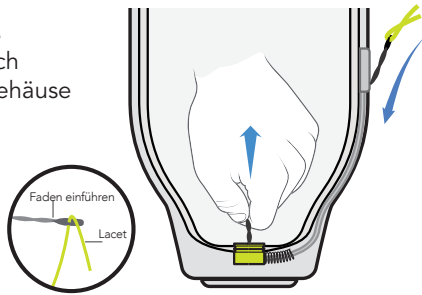


4 das Einstellrad einfädeln

a) Bereiten Sie das Stellrad für die Verschnürung vor.


- 1 Sicherstellen, dass das Stellrad eingerastet ist, indem es nach unten gedrückt wird.
- 2 Das Stellrad umdrehen und sicherstellen, dass die grüne Markierung mit dem grünen Pfeil ausgerichtet ist. Ist dies nicht der Fall, halten Sie die Basis fest und drehen Sie das Einstellrad, bis die Markierungen übereinstimmen.

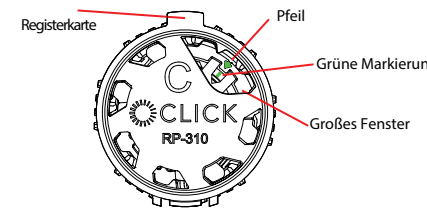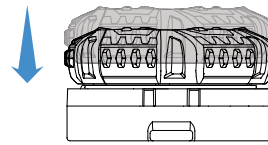

b) Lokalisieren Sie die Öffnungen für die Schnürung.


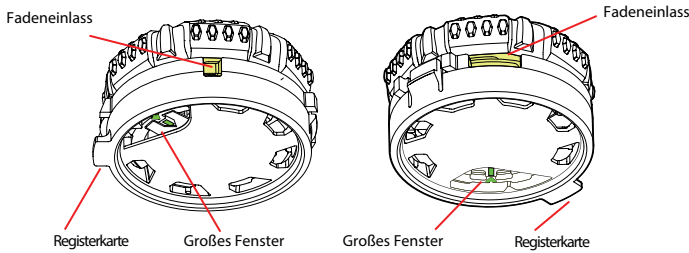


c) Führen Sie den Faden durch die Einlassöffnung und aus der Auslassöffnung auf der gegenüberliegenden Seite des Einstellrads

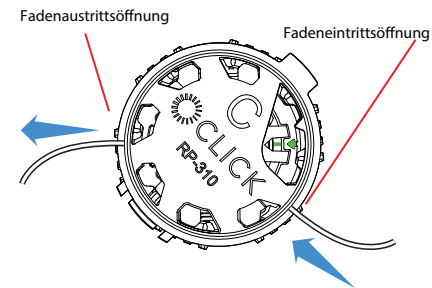


d) Den Faden mit einem Überhandknoten binden.

- 1 Eine Schlaufe machen.
- 2 Mit der Schlaufe einen Überhandknoten machen.
- 3 Den Knoten festziehen. Die Schlaufe des Knotens sollte ca. 1 cm lang sein.
- 4 Schneiden Sie das Ende ab.

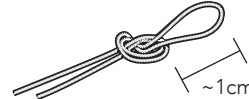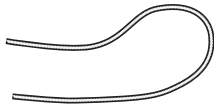




e) Ziehen Sie die Schlaufe in das Einstellrad, um den Knoten zu setzen.

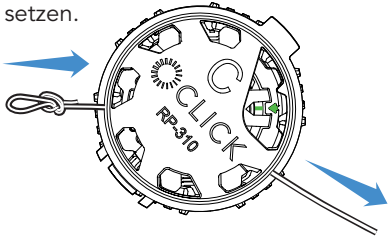

5 Bringen Sie das Einstellrad an.


a) Stecken Sie den Fuß des Einstellrads in den Kragen.

b) Drücken Sie die Spule fest in den Kragen (Sie sollten ein "Klick" hören, wenn sie fest sitzt).

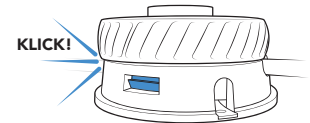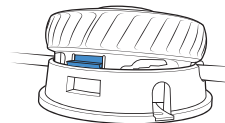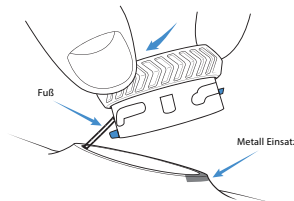


6 Länge des Fadens.

Bestimmen Sie, wie viel Faden benötigt wird, um über den Schaft hinauszugehen und am Innenfutter und am Gewindeeinsatz befestigt zu werden.

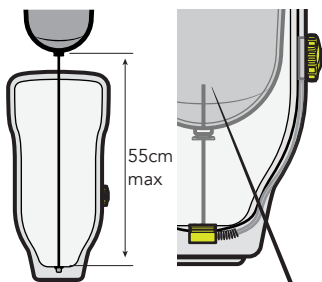


Führen Sie den Faden mit Hilfe eines Fadenführers ein und machen Sie einen doppelten Überhandknoten.

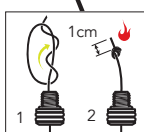

Hinweis: Die maximale Länge des Fadens darf 55 cm nicht überschreiten.

7 Testen Sie die Funktion.

- Befestigen Sie den Gewindeeinsatz an der Einlage.
 - Wickeln Sie den Faden auf.
 - Ziehen Sie das Einstellrad zum Lösen heraus.
 - Ziehen Sie den Einsatz und den Faden aus der Fassung.
 - Wickeln Sie den Faden wieder auf.
- Hinweise: :
- Überprüfen Sie den Faden regelmäßig auf Anzeichen von Ausfransungen oder Ermüdung
 - Ersetzen Sie den Faden alle 6 Monate.
 - Halten Sie die Fäden von offenen Flammen fern.

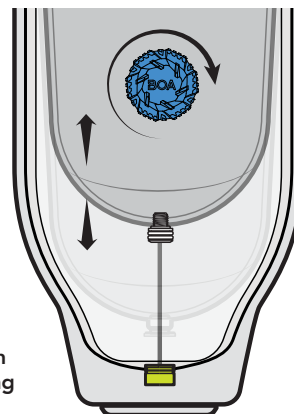

✓ Herzlichen Glückwunsch! Sie sind fertig!

