

GARANTIE:

www.clickmedical.co/terms/#warranty

U.S. Kunden :

Direkter Kontakt zu Click Medical
Help@clickmedical.co
 Hilfe-Hotline: +1 970 670 7012

Internationale Kunden :

Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Händler.

Die Produkte von Click Medical sind durch Patente geschützt.

Eine vollständige Liste finden Sie unter www.clickmedical.co/patents

Überarbeitet 2023



Hinweis

Muss von einem in RevoLock geschulten Fachmann angebracht werden. Die Schnur nutzt sich ab. Mindestens monatlich überprüfen und alle 6 Monate austauschen.

Ein Versagen der Schnur kann zum Verlust der Aufhängung führen.

Nicht bei Patienten mit Nervenproblemen verwenden.

Die Schnur von offenen Flammen und scharfen Kanten fernhalten.

Die Einlage vor dem Spannen des Systems am Liner befestigen.

Siehe Gebrauchsanweisung in anderen Sprachen: clickmedical.co/advisories



MDSS-UK RP LIMITED, 6 Wilmslow Road
 Rusholme, M14 5TP Manchester
 Großbritannien



MDSS CH GmbH, Laurenzenvorstadt 61
 5000 Aarau, Schweiz




MDSS GmbH, Schiffgraben 41
 30175 Hannover, Deutschland



Click Medical, LLC, 1205 Hilltop Parkway, W101
 Steamboat Springs, CO 80487, USA +1-970-670-7012

RevoLock® RevoLock® V2 & V3 HC Lace Kit Port A Inhalt:

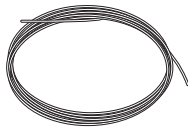

Schnur



Schnurzuführung


Verwenden Sie diese Anleitung für Instrumente, die den "A Lace Port" verwenden, um die Schnur zum distalen Ende des Schafts zu führen.

Schulungsvideos zur Click Adjustability und RevoLock Bedienung finden Sie unter

www.clickacademy.co


1 Entfernen Sie das Einstellrad.

- Den Metalleinsatz ausfindig machen.
- Einen kleinen Schlitzschraubendreher zwischen Metalleinsatz und Einstellradgehäuse einführen.
- Die Spule vorsichtig nach oben anheben.

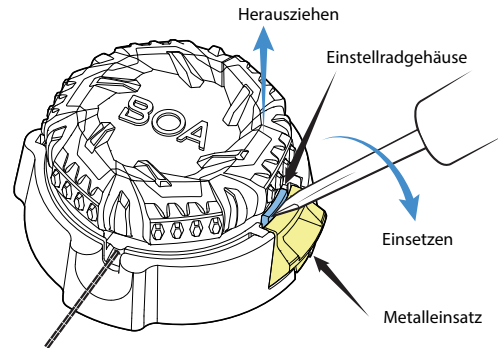


2 Schnur entfernen


- Vergewissern Sie sich, dass das Einstellrad geöffnet ist, indem Sie es nach oben ziehen.

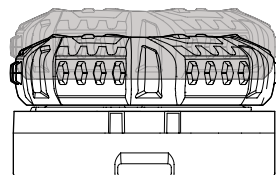

- Die gesamte Schnur aus dem Einstellrad herausziehen.

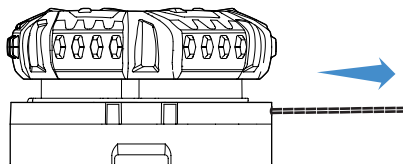


- Die große Öffnung für den Austritt der Schnur an der Unterseite des Einstellrads ausfindig machen. Die Schlaufe der Schnur mit einem Zahnstocher in das Einstellrad einhaken und die Schnur aus dem Einstellrad herausziehen.

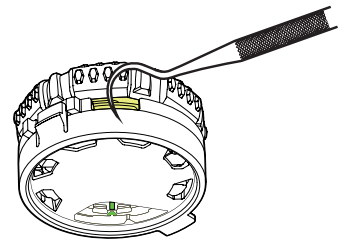


- Die Schnur abschneiden und aus dem Einstellrad herausziehen. Dann die Schnur aus dem Gerät entfernen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Ersatzspule verwenden (siehe C auf der Unterseite des Einstellrads)

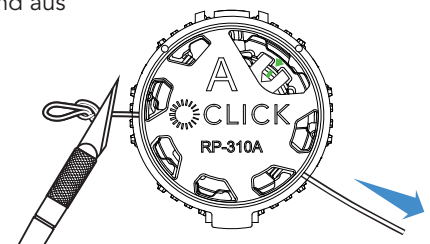

3 Schnüren Sie das System zusammen


Die Schnur mit Hilfe der Schnurzuführung vom Einstellradhals in den Schlauch und durch das distale Gehäuse in den Schaft führen.

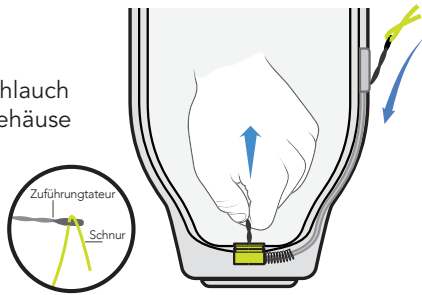


4 Das Einstellrad verschnüren

a) Das Einstellrad für die Verschnürung vorbereiten


- 1 Sicherstellen, dass das Einstellrad eingerastet ist, indem sie nach unten gedrückt wird.

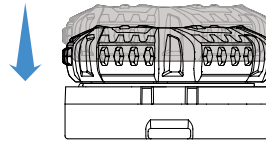


- 2 Das Einstellrad umdrehen und prüfen, ob die grüne Markierung mit dem grünen Pfeil übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, die Basis festhalten und das Einstellrad drehen, bis die Markierungen übereinstimmen.

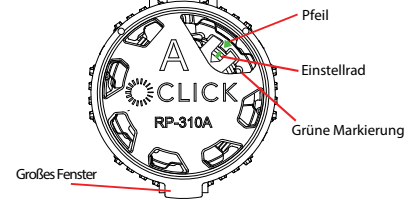

b) Suchen Sie die Öffnungen für die Schnur.

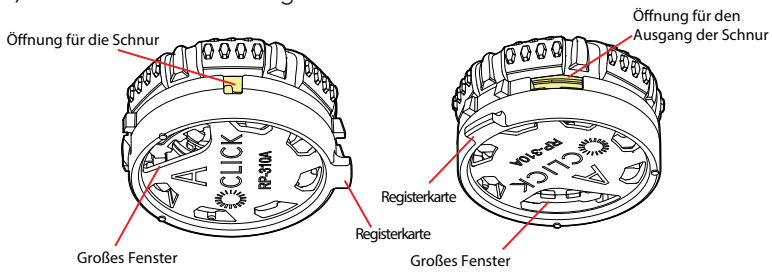

c) Führen Sie die Schnur durch die Eintrittsöffnung und aus der Austrittsöffnung auf der gegenüberliegenden Seite des Einstellrads heraus.

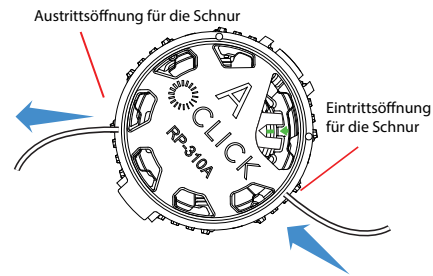

d) Die Schnur mit einem Überhandknoten binden


- 1 Eine Schlaufe bilden




- 2 Mit der Schlaufe einen Überhandknoten machen.




- 3 Den Knoten festziehen. Die Schlaufe des Knotens sollte ca. 1 cm lang sein.

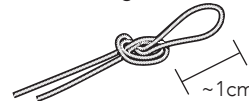

- 4 Das Ende abschneiden

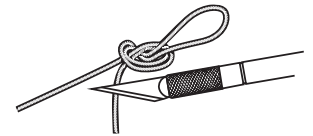


e) Die Schlaufe in das Einstellrad ziehen, um den Knoten zu fixieren.


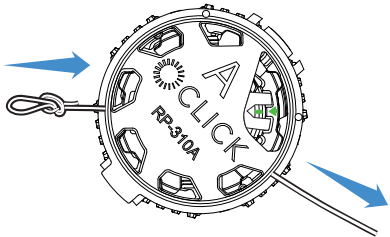


5 Befestigen Sie das Einstellrad

a) Den Fuß des Einstellrads in den Kragen stecken

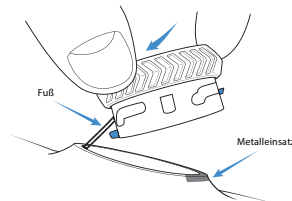


b) Die Spule fest in den Kragen drücken (es sollte ein "Klick" zu hören sein, wenn sie fest sitzt).

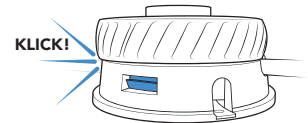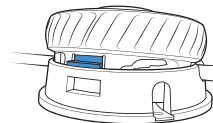


6 Länge der Schnur

Bestimmen Sie, wie viel Schnur Sie benötigen, um über den Schaft hinauszugehen und am Gewindeinsatz befestigt zu werden

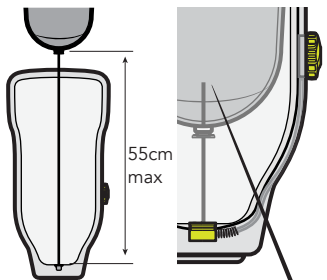

Einen Schnurzuführer verwenden, die Schnur einführen und einen doppelten Überhandknoten machen.

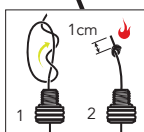


Hinweis: Die maximale Länge der Schnur darf 55 cm nicht überschreiten.

7 Funktion prüfen

- Gewindeinsatz an der Einlage befestigen.
- Die Schnur aufwickeln.
- Zum Lösen den Gewindeinsatz herausziehen.
- Einsatz und Schnur aus der Hülse ziehen.
- Die Schnur wieder aufwickeln.

Hinweise:

- Überprüfen Sie die Schnur regelmäßig auf Anzeichen von Ausfransen oder Ermüdung.
- Die Schnur alle 6 Monate austauschen.
- Die Schnur von offenem Feuer fernhalten.

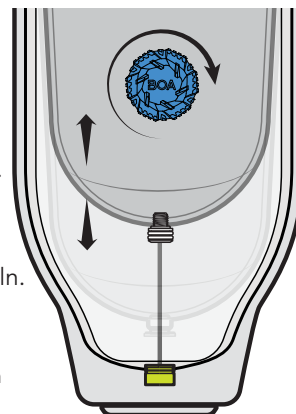

✓ Herzlichen Glückwunsch ! Sie sind fertig !

