

# Kit d'enrouleur et de lacet Click®.

Pour plus de ressources, visitez [clickmedical.co](http://clickmedical.co)

RP-000-07



## Avertissements

Doit être installé par un professionnel agréé.  
Ne pas utiliser sur des patients souffrant de problèmes nerveux.  
Un serrage excessif pourrait compromettre la circulation.  
Le lacet s'use :

- Vérifiez régulièrement l'usure ou les dommages.
- Recherchez les fibres noires cassées autour des zones d'usure importante.
- Remplacez le lacet si une quantité importante de fibres noires est cassée.
- Remplacez les lacets de manière proactive tous les 6 mois.
- Maintenez les lacets à l'écart des flammes nues et des bords tranchants.

**Limite de poids :** 100 kg par enrouleur Click®.

Voir les avis dans d'autres langues : [clickmedical.co/advisories](http://clickmedical.co/advisories)



## GARANTIE

**Clients américains :**



Contactez [www.clickmedical.co/terms/#warranty](http://www.clickmedical.co/terms/#warranty)  
[Help@ClickMedical.co](mailto:Help@ClickMedical.co)

Tél. : +1-970-670-7012


**Clients internationaux :**

Veuillez contacter votre distributeur local.


## BREVET EN INSTANCE AUX ÉTATS-UNIS

|  |   |   |
|--|---|---|
| <div>MD</div> <div>EC REP</div>  | <div>MDSS GmbH</div> <div>Schiffgraben 41</div> <div>30175 Hannover,</div> <div>Germany</div>   |  |
|  | <div>Click Medical, LLC</div> <div>1205 Hilltop Parkway, W101</div> <div>Steamboat Springs, CO,</div> <div>80487, USA +1-970-670-7012</div> |   |

## Contenu du kit Click® Reel:

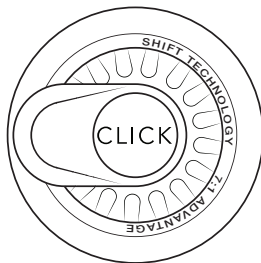


Enrouleur Click® Reel

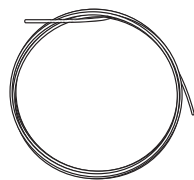


2.0 m de lacet indicateur



Distributeur de lacet en métal

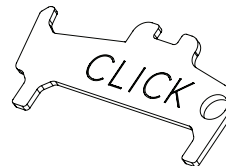

Outil pour enrouleur

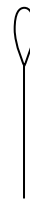

Distributeur de lacets en plastique x 3


## Remplacement d'un enrouleur Click® Reel

### 1 Retirez l'enrouleur existant de l'appareil :

- Localisez l'insert métallique.
- Insérez un petit tournevis à tête plate entre l'insert métallique et le corps de l'enrouleur.
- Faites délicatement lever sur l'enrouleur vers le haut.
- Coupez le lacet pour retirer l'enrouleur du dispositif.

Voir [clickmedical.co/instructions](http://clickmedical.co/instructions) pour des instructions détaillées sur le remplacement/la pose d'un enrouleur.



### 2 Retirez l'ancien lacet.

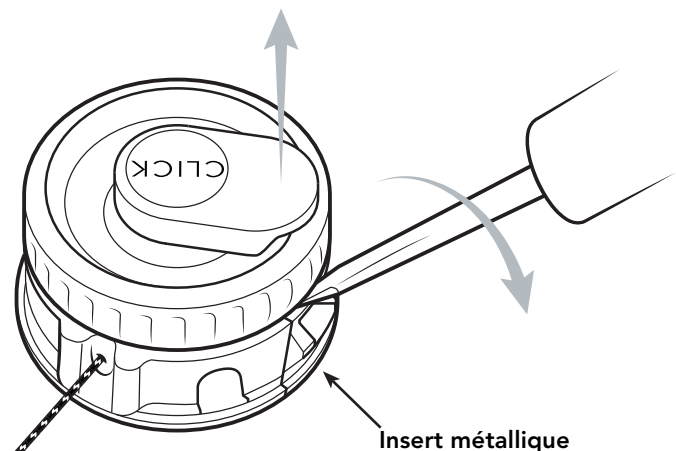

### 3 Fixez le lacet à l'enrouleur Click®.

#### Étape 1

Orientez l'enrouleur de façon à ce que le pied de l'enrouleur soit aligné avec le vide dans le collier de lamination opposé à l'insert métallique. Déterminez ensuite quel(s) trou(s) de lacet correspond(ent) à votre trajet de lacet.

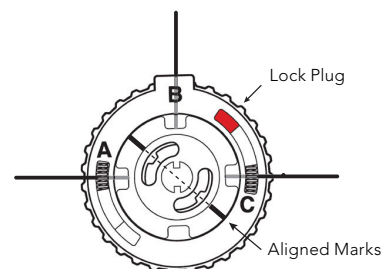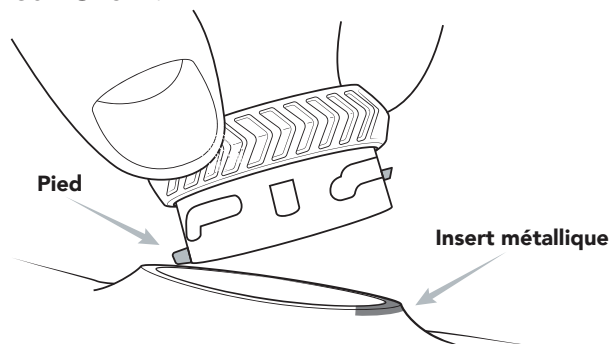


- 3 ports de lacage possibles ( A, B, C )
- **Assurez-vous que les fenêtres de lacage sont alignées.**  
Ajustez la position en tournant la molette.

#### Étape 2

Lacez l'enrouleur à l'aide du distributeur de lacet en plastique.


#### Conseils de pro :

1. Pliez légèrement l'extrémité du distributeur de lacet.
2. Une fois inséré dans le trou de lacet, tournez le distributeur pour aider à sortir du trou de lacet.

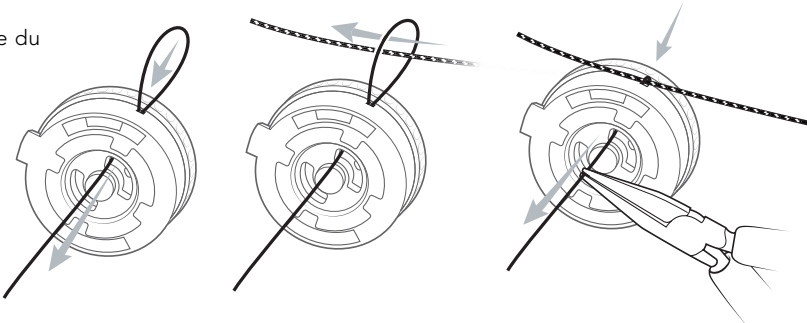

#### Étape 3

Faites un nœud plat à la longueur désirée et coupez le bout.

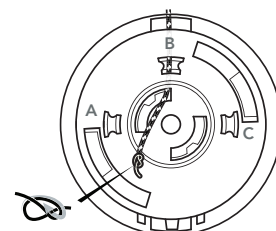


#### Étape 4

Tirez sur le lacet pour placer le nœud de l'autre côté du milieu du conduit.

**Enfoncez complètement le nœud dans le trou métallique à l'aide d'un tournevis à tête plate.**

Point central du conduit

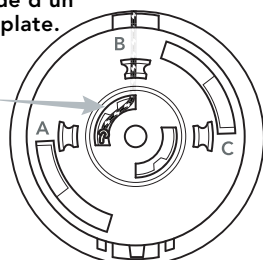


#### Étape 5

Répétez le processus pour l'autre extrémité du lacet. Laissez -5 cm de lacet libre dans le système.

#### Étape 6

Retirez le bouchon de verrouillage pour activer la fonction Shift® de l'enrouleur.



**Conseil de pro :** Conservez le bouchon de verrouillage pour une éventuelle utilisation ultérieure.

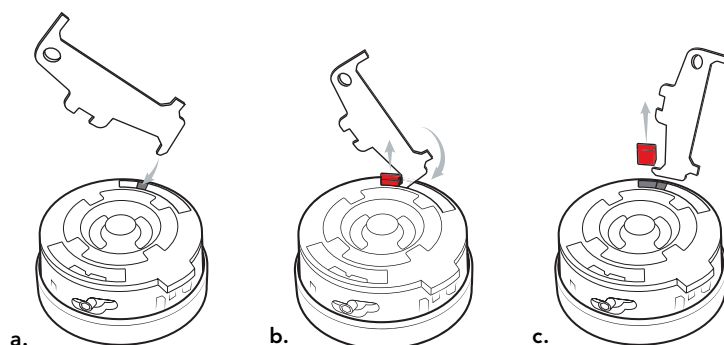

### 4 Installez l'enrouleur Click®.

a. Insérez le pied de l'enrouleur dans le vide situé au fond du collier, à l'opposé de l'insert métallique.

b. Appuyez fermement sur l'enrouleur dans le collier (vous devez entendre un "CLIC" lorsqu'il est bien fixé).

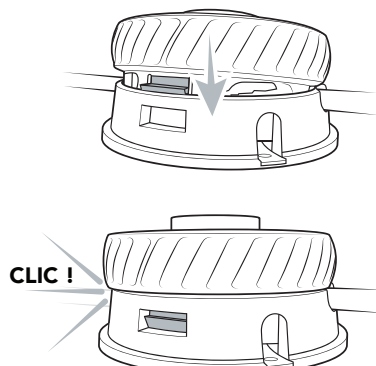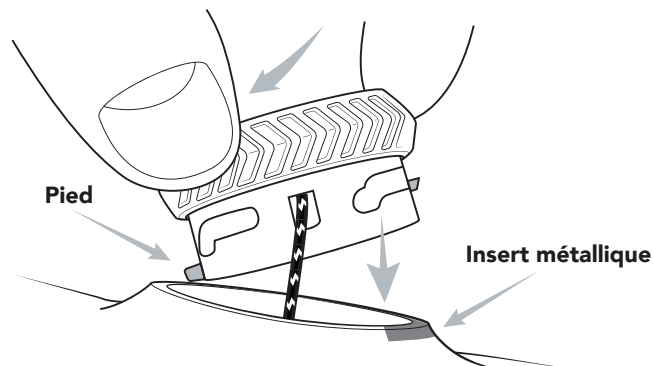


### 5 Testez le fonctionnement.

Faites tourner le système 3 fois avant de le livrer pour vérifier son bon fonctionnement.


# Instructions d'utilisation de l'enrouleur Click®.

- 1 Tournez l'enrouleur pour prendre rapidement le lacet.

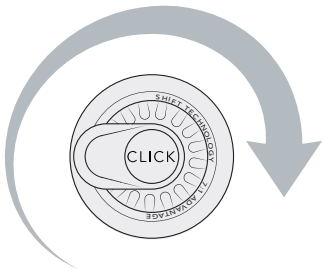

Mode 1:1 = silencieux

- 2 L'enrouleur passe automatiquement en mode haute puissance au fur et à mesure qu'il se resserre.

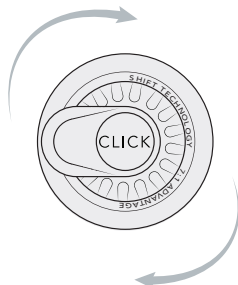


Mode 7:1 = "clic".

- 3 Micro-ajustement en tournant vers l'avant ou l'arrière.



**Conseil de pro :** Si vous préférez que l'enrouleur fonctionne UNIQUEMENT en mode micro-réglage, remplacez le bouchon de verrouillage pour "désactiver" la fonction Shift®.

- 4 Pour une libération complète, déroulez jusqu'à ce que le "clic" s'arrête.

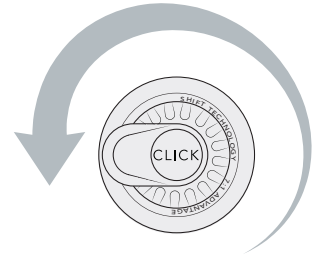

## Gérez en toute sécurité la tension du lacet avec l'embrayage de l'enrouleur Click® :


Prescrivez le niveau exact de tension pour n'importe quel dispositif.

### Pourquoi utiliser la fonction de sécurité de l'embrayage?

- 1. Tension limitée :** Limitez la quantité de tension que l'enrouleur peut produire pour éviter un serrage excessif.
  - Pour les utilisateurs souffrant de : neuropathie, problèmes circulatoires, peau sensible (greffes) ou problèmes de non-conformité.
- 2. Tension répétable :** Définissez un niveau de tension répétable qui permet à l'utilisateur de s'ajuster au même niveau de tension à chaque fois.
  - Utile pour : les patients qui ne se conforment pas ou les nouveaux amputés qui apprennent juste à gérer le volume et l'ajustement. Pratique pour les utilisateurs qui veulent simplement savoir si leur douille est adaptée comme vous l'avez prescrit.

À l'aide d'une clé Allen de 2 mm, il suffit de tourner la vis de réglage de l'embrayage pour régler la tension.

- ↻ A droite pour augmenter la tension maximale
- ↻ Gauche pour diminuer la tension maximale

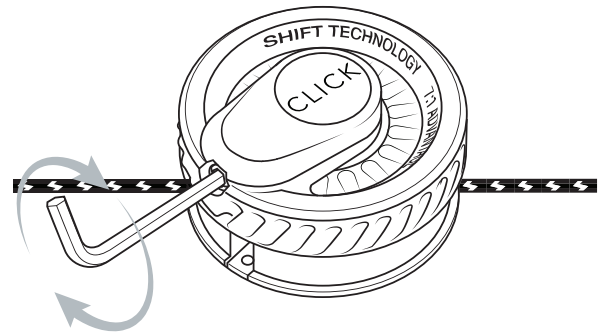

## Inspectez régulièrement votre système.




### Inspectez le lacet :

- ✓ Vérifiez régulièrement l'absence d'usure ou de dommages.
- ✓ Remplacer au moindre signe d'usure
- ✓ Remplacer le lacet tous les 6 mois.



Ce produit est étanche et submersible. Rincer à l'eau douce après une utilisation dans l'eau salée, le sable ou la boue.

### LACET NEUF

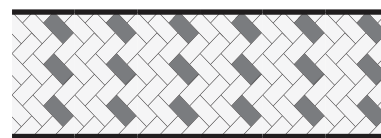

### LACET USE



Recherchez les fibres noires cassées dans les zones d'usure importante. Si une quantité importante de fibres noires est cassée, remplacez le lacet.

Demandez à votre patient d'enregistrer son appareil :

<https://clickmedical.co/register/>