

## GARANTIE

Der Click Reel ist garantiert für die Lebensdauer des Geräts, in das er ursprünglich eingebaut wurde. Die Registrierung des Click Reel ist zum Zeitpunkt der Auslieferung des Geräts erforderlich. Zum

Registrieren: <https://clickmedical.co/contact-us/cr-registration/>

## GARANTIE

Für Garantieinformationen zu allen Produkten von Click Medical: <https://clickmedical.co/terms/#warranty>

## U.S. Kunden:

Kontakt [Help@ClickMedical.co](mailto:Help@ClickMedical.co)

Tel: +1-970-670-7012

## Internationale Kunden:


Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler. Siehe Anleitungen in anderen Sprachen: [clickmedical.co/instructions](https://clickmedical.co/instructions)

Materialvorschläge und Richtlinien finden Sie auf die **Materialdatenblatt**: [clickmedical.co/mds](https://clickmedical.co/mds)

Die Produkte von Click Medical sind patentrechtlich geschützt. Vollständige Liste siehe [www.clickmedical.co/patents](https://www.clickmedical.co/patents)


## Click Reel Grip Kit Inhalt:

## Andere benötigte Materialien (nicht mitgeliefert):

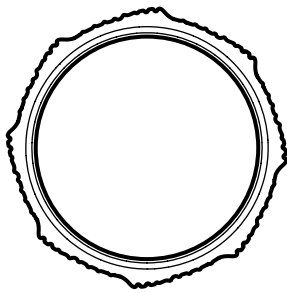

Komfort-Griff x5  
AC-100-05

- ODER -

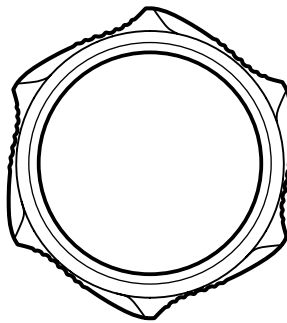

Kraftgriff x5  
AC-101-05



Bürste




Kontaktkleber oder  
Ähnliches




Oberflächenreiniger  
Isopropylalkohol  
oder Ähnliches

## Vorbereitung der Oberfläche:

- 1 Reinigen Sie die gesamte Oberfläche des Reels mit Isopropylalkohol (in grau gezeigt).

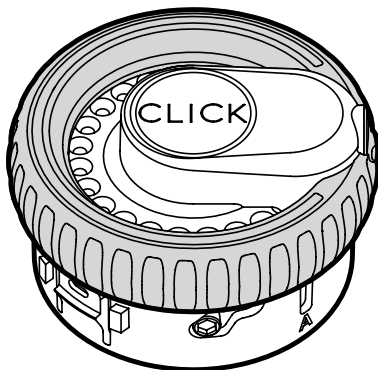


- 2 Reinigen Sie die gesamte Innenfläche des Griffs mit Isopropylalkohol (in grau gezeigt).

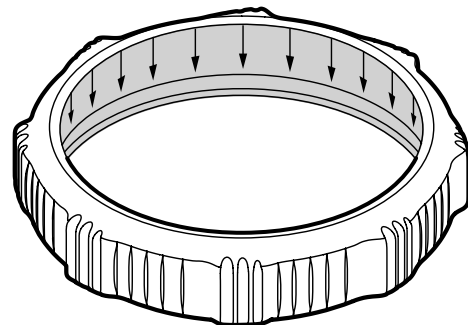

## Kleber Anwendung:


### 3 Kleber Anwendung:

1. Mit dem Pinsel Klebstoff auf die Innenfläche des Griffs auftragen.
2. Klebstoff mit dem Pinsel auf den Griff des Reels auftragen.

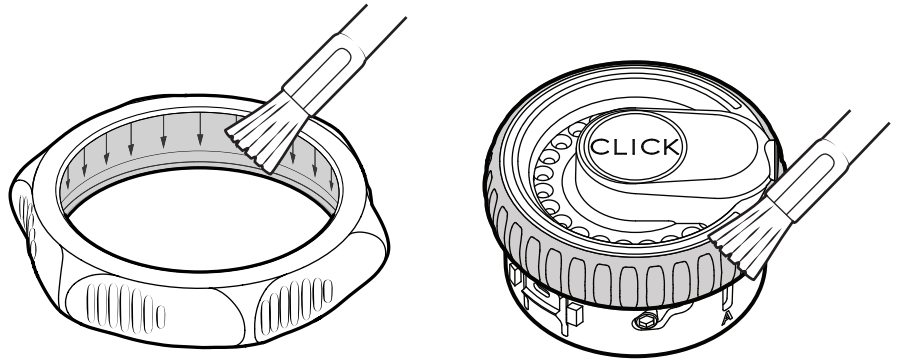


## Griffbefestigung:


- 4 Identifizieren Sie die Unterseite des Griffs. Auf der Innenseite des Griffs befinden sich Pfeile, die die Unterseite anzeigen.

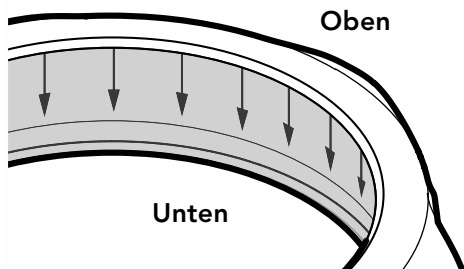


- 5 Vergewissern Sie sich, dass der Griff richtig ausgerichtet ist, damit die Fingerauflagen mit der Anzugsrichtung übereinstimmen.

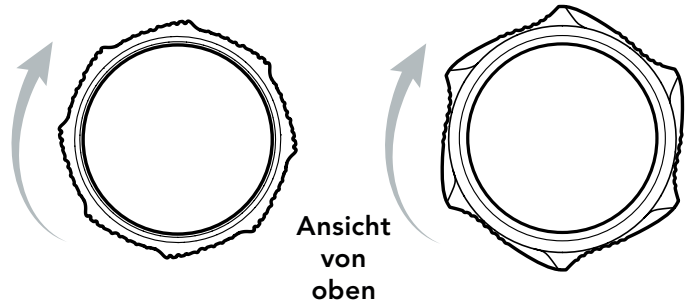

- 6 Schieben Sie den Griff über das Reel, solange der Klebstoff noch feucht ist.

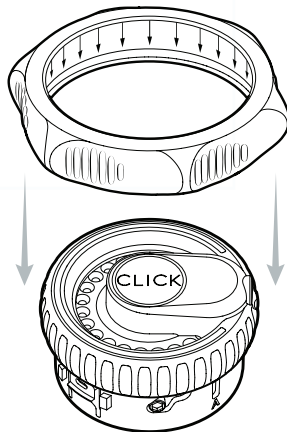

**Profi-Tipp:** Für ein optimales Aussehen richten Sie den Griff auf die Mittellinie des Reel aus.

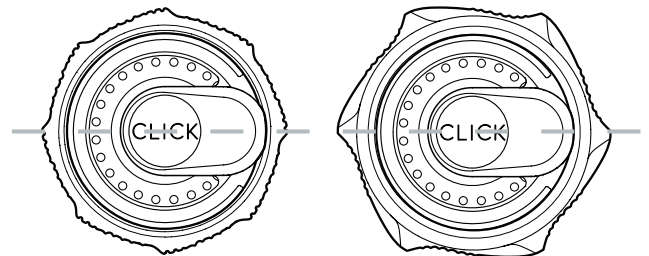

## Fertigstellung:

- 7 Lassen Sie dem Klebstoff ausreichend Zeit zum Trocknen.



- 8 Prüfen Sie nach dem Trocknen des Klebstoffs, ob der Griff fest mit dem Reel verbunden ist.

- 9 Entfernen Sie überschüssigen Klebstoff vom Reel.

**UK REP** MDSS-UK RP LIMITED, 6 Wilmslow Road  
Rusholme, M14 5TP Manchester  
Vereinigtes Königreich

**CH REP** MDSS CH GmbH, Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Schweiz

**MD** MDSS GmbH, Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Deutschland

**EC REP** 



Click Medical, LLC, 1205 Hilltop Parkway, W101  
Steamboat Springs, CO 80487, USA +1-970-670-7012