

Istruzioni di sostituzione per:

RP0200-130-05, Kit di sostituzione rotella e laccio QuickFit® - Nero
RP0200-130-W, Kit di sostituzione rotella e laccio QuickFit® - Bianco



Per assistenza e istruzioni video: clickmedical.co/quickfit-lacer

Contenuto del kit di sostituzione:



1x ricambio
Laccio in acciaio, 1,5 m



1x rotella BOA®
di ricambio

Compatibile con:

QFL-130-B-2, QuickFit® Lacer - Nero confezione da 2
QFL-130-W-2, QuickFit® Lacer - Bianco confezione da 2



Avviso

Deve essere installato da un professionista qualificato. Il laccio è soggetto a usura. Come minimo, controllarlo ogni mese. Un serraggio eccessivo potrebbe ridurre la circolazione. Non utilizzare su pazienti con problemi ai nervi. Tenere il laccio lontano da spigoli e bordi taglienti.

Consulta gli avvisi in altre lingue: clickmedical.co/advisories



GARANZIA:
www.clickmedical.co/terms/#warranty
Clienti USA: Contatta direttamente Click Medical:
Help@ClickMedical.co Linea di assistenza: +1 970 670 7012
Clienti internazionali: Contatta il tuo distributore locale

UK REP

Parkway House, Palatine Rd, Northenden, Wythenshawe, Manchester M22 4DB Regno Unito

CH REP

MDSS CH GmbH, Laurenzenvorstadt 61 5000 Aarau, Svizzera

MD


MDSS GmbH, Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germania

EC REP



Click Medical, LLC, 1205 Hilltop Parkway, W101 Steamboat Springs, CO 80487, USA +1-970-670-7012


- 1 Tira la bobina per aprirla e rilasciare la tensione.

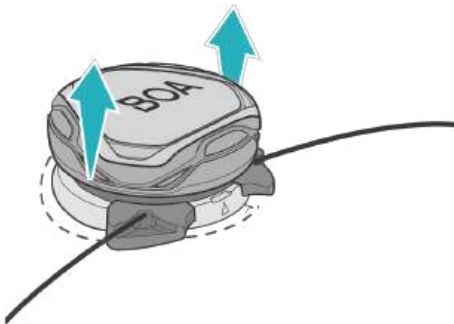

- 2 a. Inserire un cacciavite a taglio nella linguetta con l'indicatore a freccia.




b. Usa l'attrezzo per fare leva verso l'alto sul rocchetto finché la cartuccia non si sgancia dalla baionetta.

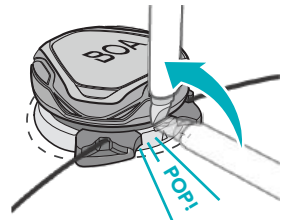


Nota: la linguetta si trova sopra la piastra di montaggio, tra i passalacci.


- 3 Taglia il laccio per rimuovere dal sistema il vecchio rocchetto e il laccio.

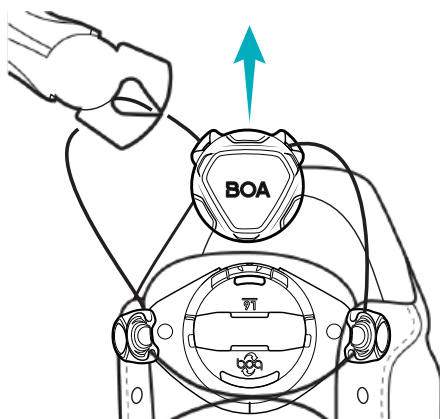


- 4 Infila i passalacci come mostrato.

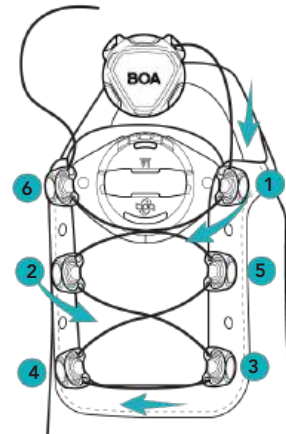

Il laccio può essere fatto passare dritto nel passalaccio (A) oppure tirato in sede (B). Il laccio può essere sganciato dal passalaccio per indossare o togliere rapidamente.

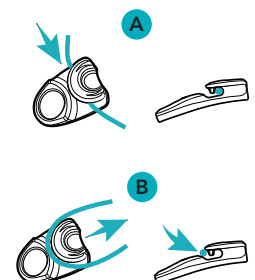

- 5 Prendi la nuova bobina e premi verso il basso per chiuderla.

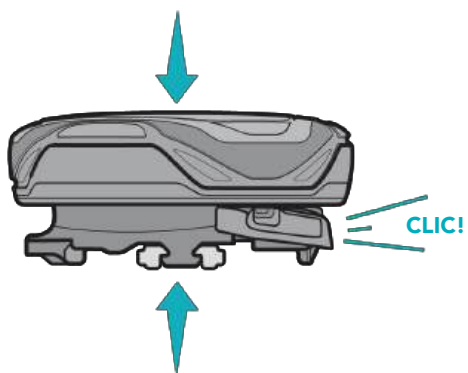


- 6 Ruota finché le due frecce sul retro della bobina non sono allineate.




- 7 Fissa il laccio al rocchetto:


- a) Fai passare il laccio destro nel passalaccio destro.

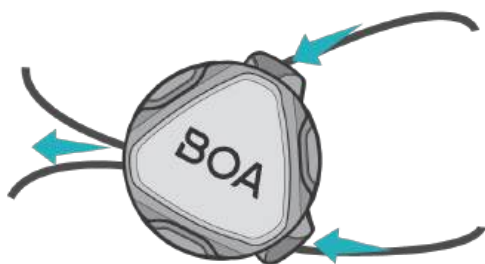


- b) Stabilisci la lunghezza di laccio necessaria. Lascia al massimo 15 cm di laccio disponibile per ogni passaggio del laccio.

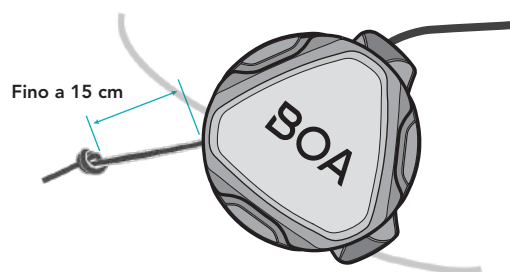

- c) Fai un nodo semplice. Taglia l'estremità lasciando 4-7 mm oltre il nodo.

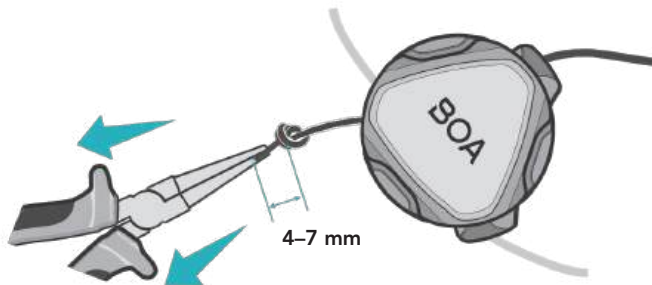


- d) Tira il nodo dentro l'apertura. Ripeti sul lato opposto della rotella.

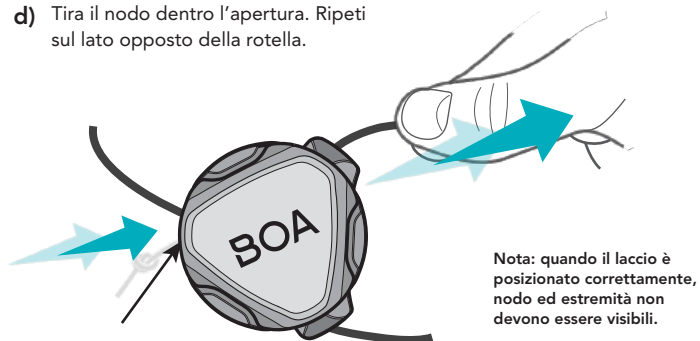


Nota: quando il laccio è posizionato correttamente, nodo ed estremità non devono essere visibili.

- 8 Inserisci a scatto la rotella fino in fondo nella piastra di montaggio.

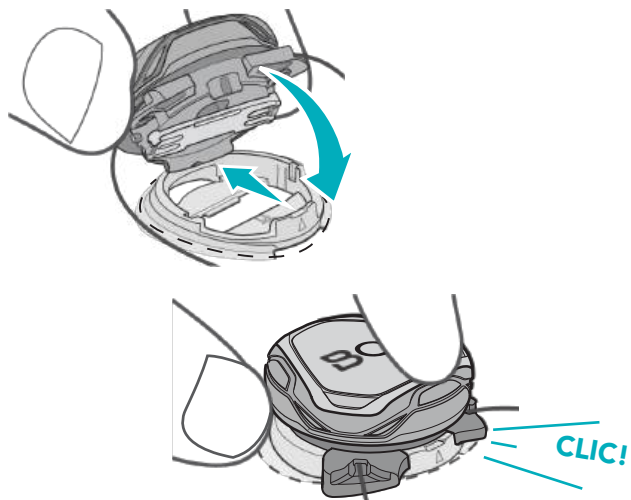

- 9 Aziona il sistema per verificarne la scorrevolezza:

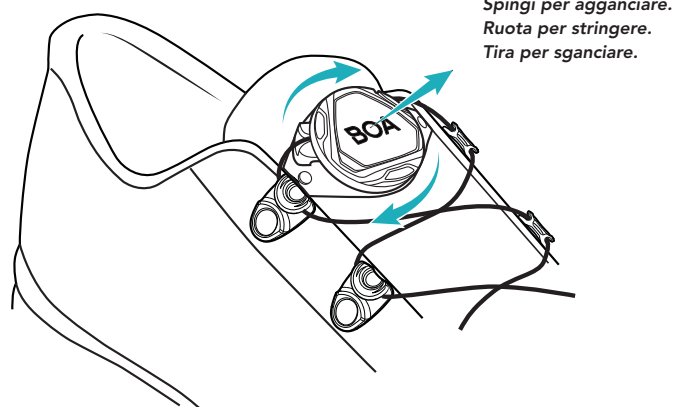

Spingi per agganciare.
Ruota per stringere.
Tira per sganciare.

Nota: se il sistema non scorre bene, rimuovi la rotella (vedi passaggi 1-2) e verifica che nodo ed estremità siano alloggiati correttamente (vedi passaggio 7).