




CLICK
MEDICAL

QuickFit® Schnürsenkelhalter Groß


QFL-230-B-2

Überarbeitet Juli 2026

Weitere Informationen finden Sie unter:
clickmedical.co/knowledge-base

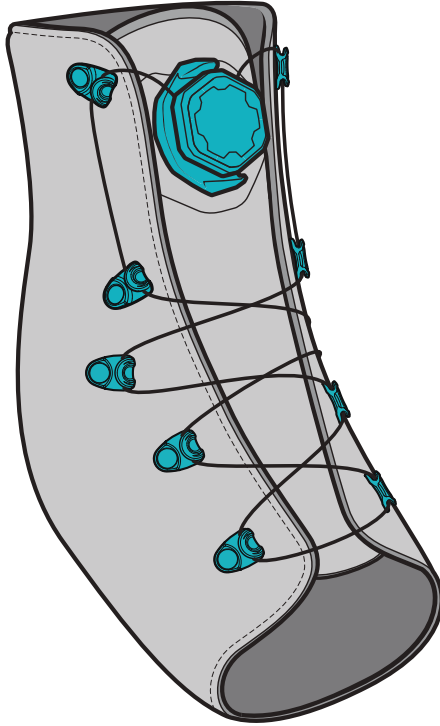

Inhalt des QuickFit® Schnürsenkelhalter-Sets (Größe L):

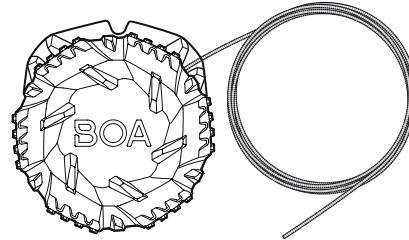


BOA® M4 Drehverschlüsse mit 1,3 m Schnürsenkel (x2)




Schnürsenkelverschluss (x2)



Nieten (x32 Stifte & Kappen)

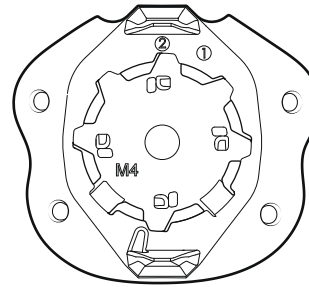

M4 tDrehverschlussgehäuse (x2)

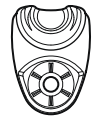

QuickLace-Führungen (x20)

Montagehinweise:

Verwenden Sie den QuickFit™-Werkzeug-Lochdorn (3,2 mm) oder ein anderes Werkzeug, um die benötigten Löcher zu bohren.

Wenn Sie vorhandene Löcher für QuickLace-Führungen verwenden, entfernen Sie die Metallösen oder Kunststoffösen, um einen sicheren Halt der Nieten zu gewährleisten.

Die Nieten können zur Überprüfung der Passform von Hand eingerastet werden. Sie müssen jedoch vor dem Anlegen einer starken Schließkraft mit dem Schnürsenkelhalter endgültig gesetzt werden.

Drücken Sie die Nieten mit dem QuickFit™-Werkzeug oder einer anderen Methode im 90°-Winkel ein. Eine schräge Montage führt zu unsauberer Nietbefestigung.

Befestigen Sie den Drehknopf an der dickeren/stabileren Stelle der Zunge.

Empfohlenes Werkzeug:

- QuickFit™-Werkzeug
- Marker
- Seitenschneider



Hinweis

Die Installation muss von einem geschulten Fachmann durchgeführt werden. Die Spitze nutzt sich ab. Überprüfen Sie sie mindestens monatlich. Zu festes Anziehen kann die Durchblutung beeinträchtigen. Nicht bei Patienten mit Nervenproblemen anwenden. Halten Sie die Spitze von scharfen Kanten fern. Hinweise in anderen Sprachen finden Sie hier:

clickmedical.co/advisories



GARANTIE:

www.clickmedical.co/terms/#warranty


Kunden in den USA:

Kontaktieren Sie Click Medical direkt:
Help@ClickMedical.co • Hotline: +1 970 670 7012


Internationale Kunden:

Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler.


- 1 Bestimmen Sie die Positionen der Führungsschienen anhand der Installationsanleitung. Stanzen Sie die Löcher mit der 3,2-mm-Stanze des QuickFit™-Werkzeugs.

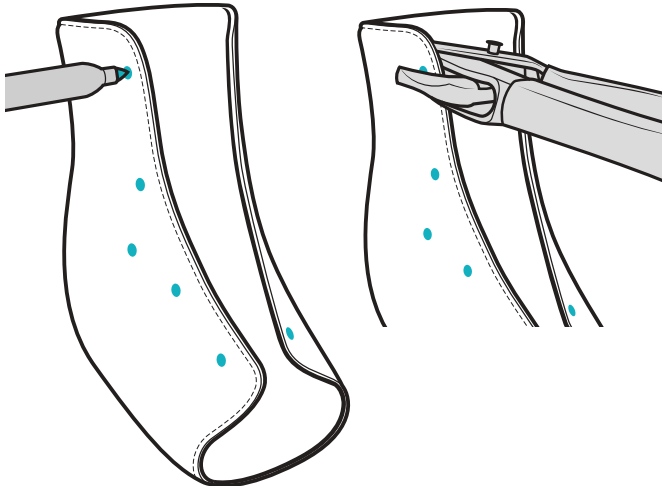


- 2 a) Befestigen Sie die QuickLace-Führungen, indem Sie den Niet von innen durch die Führung führen. b) Setzen Sie die Nietkappe auf die QuickLace-Führung und fixieren Sie diese am Schuh.

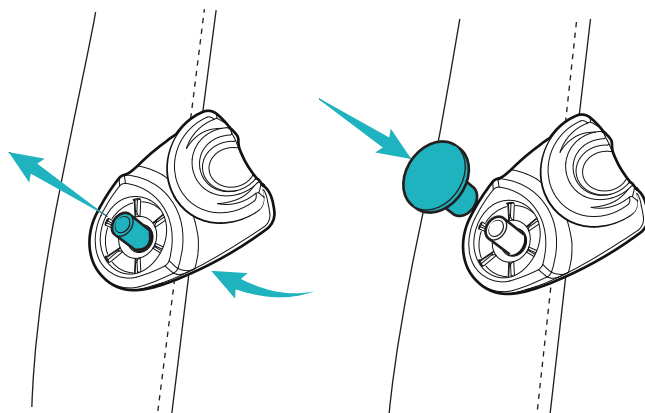


- 3 Sobald die Führung richtig sitzt, sichern Sie die Nieten mit dem Setzwerkzeug. Wiederholen Sie dies für alle Führungen.

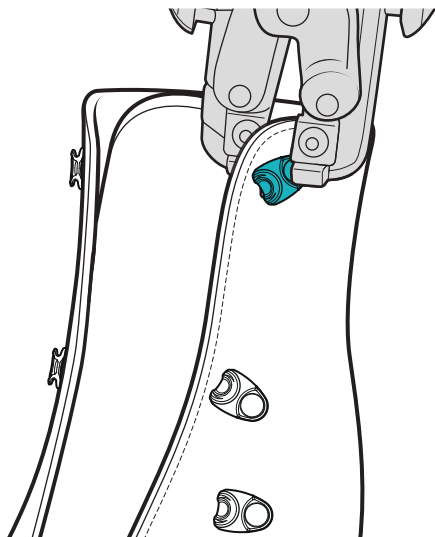


- 4 Bestimmen Sie die Position des Drehknopfs. Lassen Sie 1 cm Platz zwischen der Oberkante der Zunge und der Oberkante des Gehäuses. Markieren Sie die Position aller 4 Löcher.

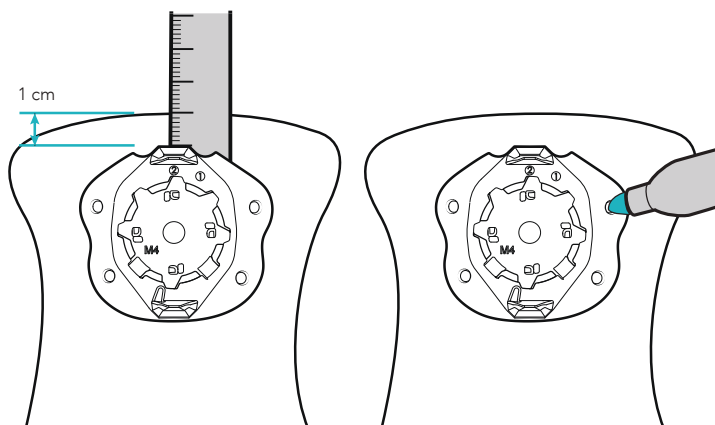


- 5 Stanzen Sie mit der 1/8"-Stanzoption des QuickFit™-Werkzeugs ein Loch.

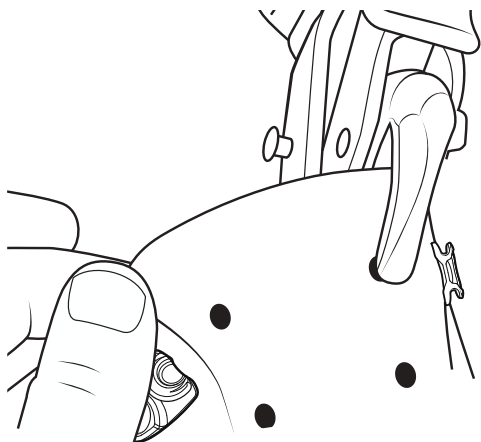


- 6 Befestigen Sie das Zifferblattgehäuse an der Zunge. Setzen Sie die Drucknieten wie in Schritt 2 beschrieben ein. Wenn Sie mit der Position zufrieden sind, fixieren Sie sie mit dem QuickFit™-Werkzeug.

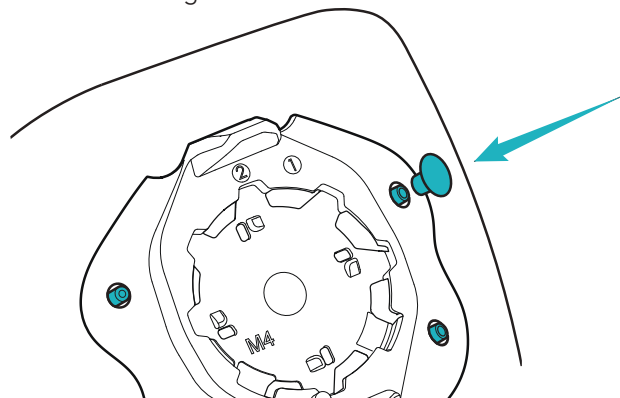


- 7 Fädeln Sie die Führungen wie abgebildet ein.

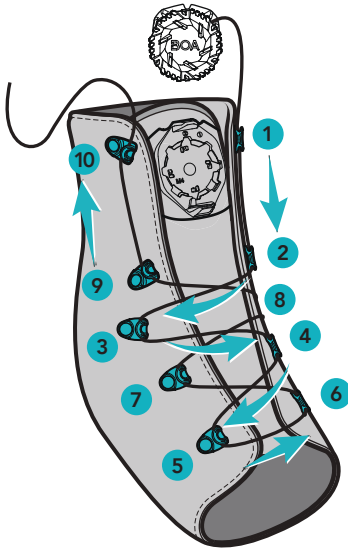

Die Schnur kann direkt durch die Führung (A) geführt oder in Position gezogen werden (B).

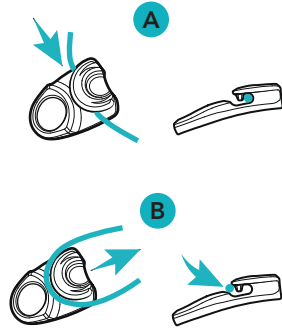


- 8 Ziehen Sie die Schnur an den Kreuzungspunkten straff und messen Sie ca. 15 cm Schnur von der letzten Führung bis zur Rückseite des Zifferblatts ab. Markieren Sie die Stelle und schneiden Sie die Schnur anschließend mit einem Seitenschneider ab.

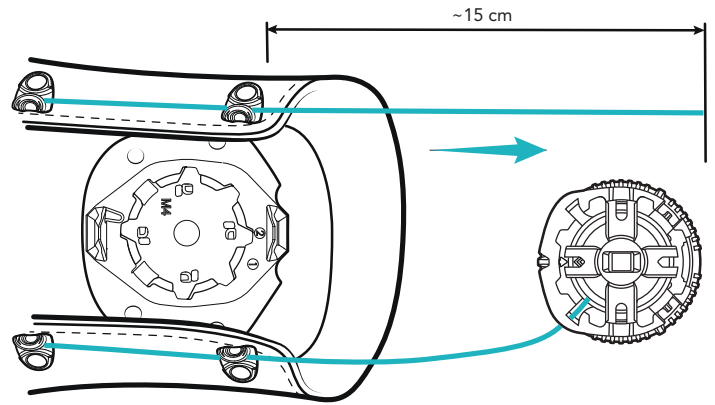


- 9 Führen Sie das freie Ende der Schnur in die offene Schnüroffnung ein, oberhalb des Kunststoffflansches, nicht darunter. Schieben Sie die Schnur dann durch das Zifferblatt, bis sie unten herauskommt.


Stellen Sie sicher, dass die Pfeile ausgerichtet sind. Falls nicht, drehen Sie das Zifferblatt, während Sie die Basis festhalten, bis die Pfeile übereinstimmen.

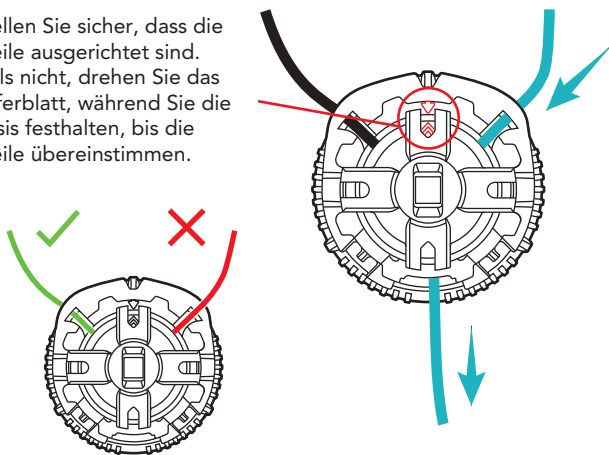

- 10 Fädeln Sie den Schnürsenkelstopper wie unten abgebildet (A) ein und lassen Sie ca. 5 mm Schnürende übrig. Ziehen Sie den Knoten fest und lassen Sie dabei die 5 mm Schnürende übrig (B). Brechen Sie den doppelten Schnurfaden ab. Den Schnürsenkelverschluss von der Basis (C) aus einführen und den Knoten mit einem kräftigen Ruck in das Zifferblattgehäuse ziehen (D).

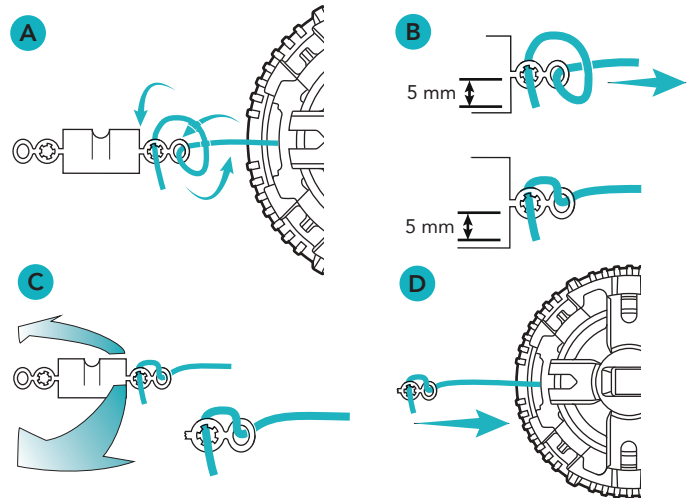

- 11 Die Kerbe in der Zifferblattbasis mit der Zahl „1“ am Zifferblattgehäuse ausrichten und das Zifferblatt in das Gehäuse schieben. Das Zifferblatt gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Kerbe die Zahl „2“ am Kragen anzeigt.

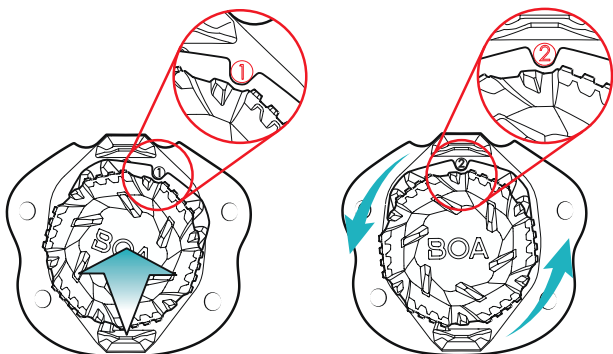

- 12 Die Funktion des Systems testen. Das Zifferblatt im Uhrzeigersinn drehen, um den Schnürsenkel festzuziehen, und das Zifferblatt herausziehen, um die Spannung zu lösen. Der Schnürsenkel kann zum schnellen An- und Ausziehen aus der Führung genommen werden.

