

Ersatzanleitung für:

RP0200-130-05, QuickFit® Drehknopf- und Schnürsenkel-Ersatzkit – Schwarz
 RP0200-130-W, QuickFit® Drehknopf- und Schnürsenkel-Ersatzkit – Weiß



Hilfe und Videoanleitungen: clickmedical.co/quickfit-lacer

Inhalt des Ersatzkits:



1× Ersatzteil
 Stahlseil-Schnürung, 1,5 m



1× BOA®
 Ersatzspule

Kompatibel mit:

QFL-130-B-2, QuickFit® Lacer – Schwarz (2er-Pack)
 QFL-130-W-2, QuickFit® Lacer – Weiß (2er-Pack)



Hinweis

Muss von geschultem Fachpersonal montiert werden. Die Schnürung unterliegt Verschleiß. Mindestens monatlich prüfen. Zu festes Anziehen kann die Durchblutung beeinträchtigen. Nicht bei Patient:innen mit Nervenproblemen verwenden. Schnürung von scharfen Kanten fernhalten.

Hinweise in weiteren Sprachen: clickmedical.co/advisories



GARANTIE:

www.clickmedical.co/terms/#warranty

Kund:innen in den USA: Wenden Sie sich direkt an Click Medical:

Help@ClickMedical.co Service-Hotline:

+1 970 670 7012 Internationale

Kund:innen: Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner

UK REP

Parkway House, Palatine Rd, Northenden, Wythenshawe, Manchester M22 4DB Vereinigtes Königreich

CH REP

MDSS CH GmbH, Laurenzenvorstadt 61 5000 Aarau, Schweiz

MD


MDSS GmbH, Schiffgraben 41 30175 Hannover, Deutschland

EC REP



Click Medical, LLC, 1205 Hilltop Parkway, W101 Steamboat Springs, CO 80487, USA +1-970-670-7012


- 1 Rolle aufziehen, um die Spannung zu lösen.

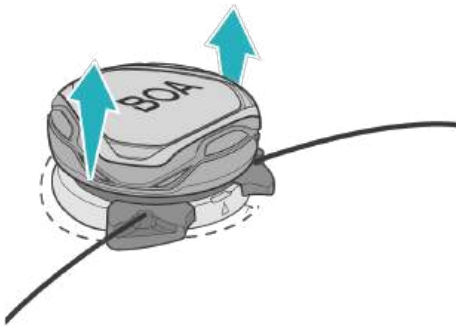

- 2 a. Schlitzschraubendreher in die Lasche mit Pfeilmarkierung einsetzen.




b. Mit dem Werkzeug die Spule nach oben hebeln, bis die Kartusche aus dem Bajonett herauspringt.

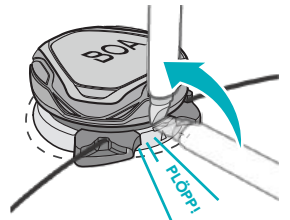


Hinweis: Die Lasche befindet sich oben auf der Montageplatte zwischen den Schnüröffnungen.


- 3 Schnürung durchtrennen, um die alte Spule und die Schnürung aus dem System zu entfernen.

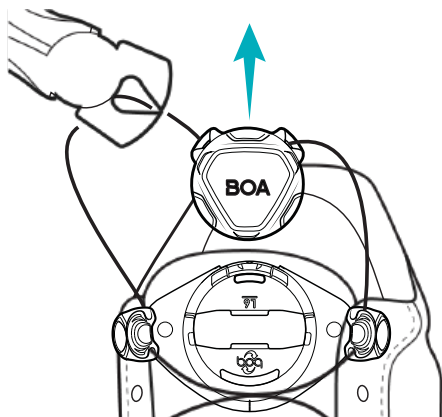


- 4 Fädeln Sie die Führungen wie dargestellt ein.

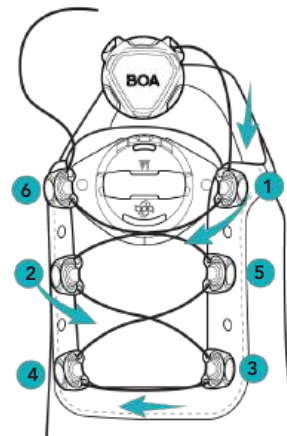

Die Schnürung kann gerade durch die Führung (A) geführt oder in Position gezogen werden (B). Für schnelles An- oder Ausziehen kann die Schnürung aus der Führung herausgeklickt werden.

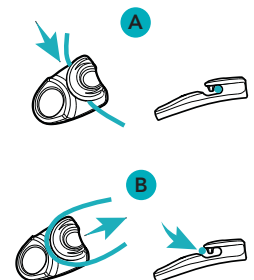

- 5 Neue Spule nehmen und zum Schließen nach unten drücken.

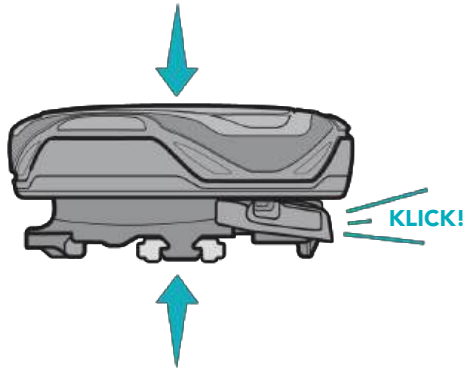


- 6 Drehen, bis die zwei Pfeile auf der Rückseite der Spule übereinanderstehen.




- 7 Schnürsenkel an der Spule befestigen:


- a) Rechten Schnürsenkel durch die rechte Schnürsenkelöffnung führen.

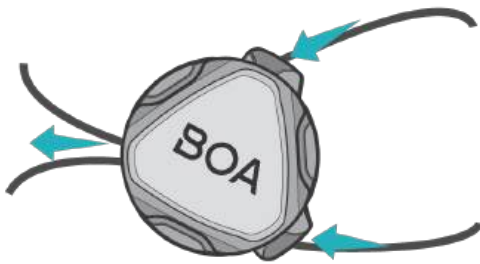


- b) Benötigte Schnürsenkellänge bestimmen. Pro Schnürsenkelöffnung maximal 15cm Schnürsenkelreserve lassen.

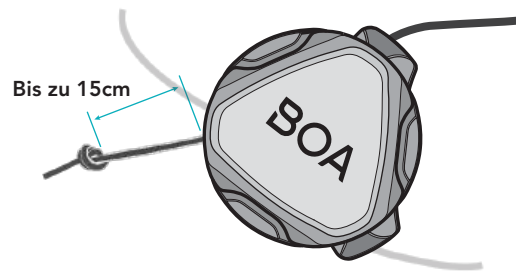


- c) Mit einem einfachen Überhandknoten abbinden. Das Ende 4-7mm hinter dem Knoten abschneiden.

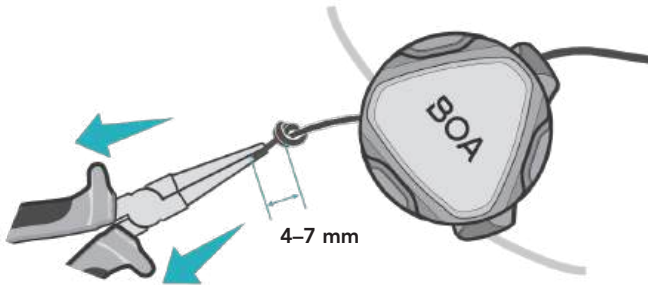


- d) Knoten in die Öffnung ziehen. Für die gegenüberliegende Seite der Spule wiederholen.

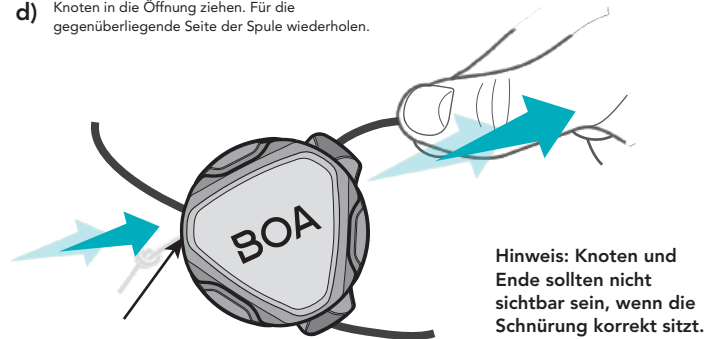

- 8 Rastet die Spule vollständig in die Montageplatte ein.

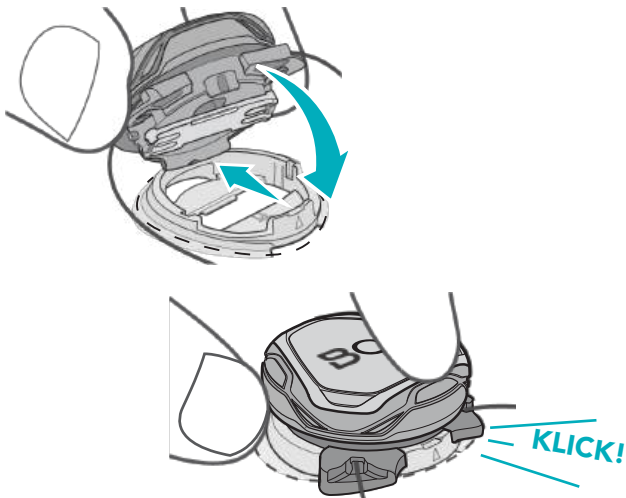

- 9 System durchlaufen lassen, um eine leichtgängige Funktion zu prüfen:

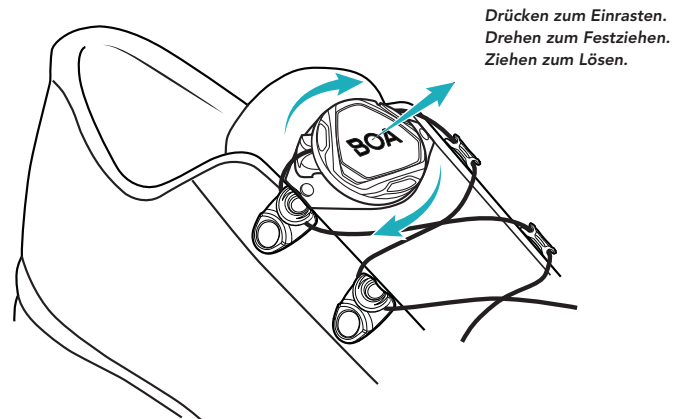

Drücken zum Einrasten.
Drehen zum Festziehen.
Ziehen zum Lösen.

Hinweis: Wenn sich das System schwergängig anfühlt, Spule entfernen (siehe Schritte 1-2) und prüfen, ob Knoten und Ende korrekt sitzen (siehe Schritt 7).