



**CLICK**  
MEDICAL



# QuickFit® Lacer Grande

QFL-230-B-2

Revisado en julio de 2026

Para más recursos, visitar:  
[clickmedical.co/knowledge-base](http://clickmedical.co/knowledge-base)

## Contenido del kit QuickFit® Lacer Grande:

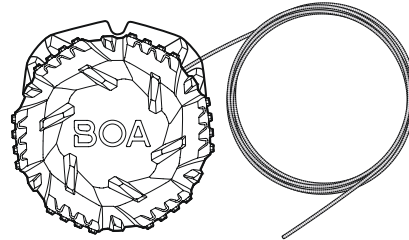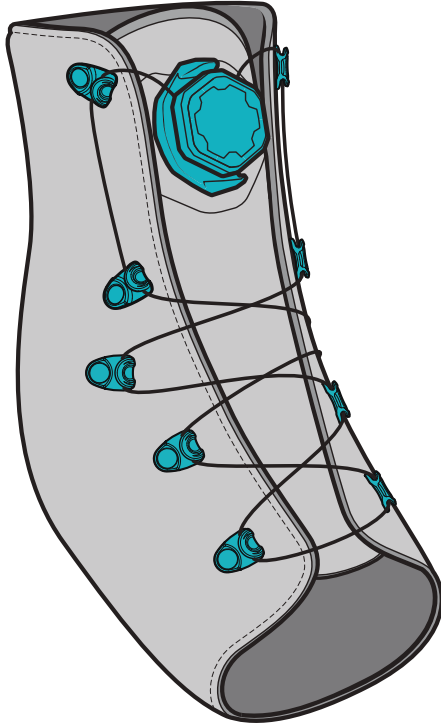


Diales BOA® M4  
con cordón de 1,3 m (x2)



Bloqueo de  
cordón (x2)



Remaches  
(x32 postes y tapa)

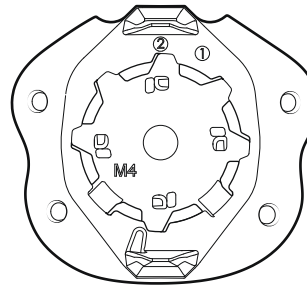

Carcasas de  
dial M4 (x2)



Guías  
QuickLace (x20)

### Consejos de instalación:

Utilizar la herramienta QuickFit™, un punzón de 1/8" u otra herramienta para realizar los orificios necesarios.

Si se utilizan orificios existentes para las guías QuickLace, retirar los ojales metálicos o plásticos de los ojales para asegurar una fijación segura.

Los remaches se pueden ajustar a mano para verificar el ajuste, pero deben colocarse antes de aplicar una fuerza de cierre significativa al cordón con el carrete.

Presionar los remaches a 90° con Herramienta QuickFit™ u otro método; presionar en ángulo provocará un ajuste deficiente del remache.

Fijar el dial en la parte más gruesa/resistente de la lengüeta.

### Herramientas recomendadas:

- Herramienta QuickFit™
- Rotulador
- Cortador de alambre



### Aviso

Debe ser instalado por un profesional acreditado.

El cordón se desgastará.

Inspeccionar el cordón al menos una vez almes.

Apretarlo demasiado podría reducir la circulación.

No usar en pacientes conproblemas nerviosos.

Mantener el cordón alejado de bordes afilados.

Consulta de los avisos en otros idiomas:

[clickmedical.co/advisories](http://clickmedical.co/advisories)



### GARANTÍA:

[www.clickmedical.co/terms/#warranty](http://www.clickmedical.co/terms/#warranty)


### Clientes de EE. UU.:

Contacte directamente con Click Medical  
Help@ClickMedical.co • Línea de ayuda: +1 970 670 7012


### Clientes internacionales:

Contactar con su distribuidor local


- 1 Determinar la ubicación de las guías utilizando las pautas de instalación. Perforar los orificios con la opción de perforación de 3 mm (1/8") Herramienta QuickFit™.

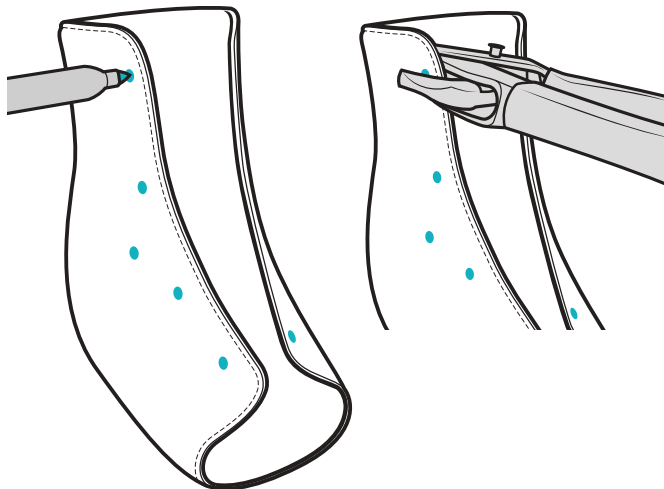


- 3 Una vez que la guía esté bien colocada, fijar los remaches con la herramienta de ajuste. Repetir el procedimiento con todas las guías.

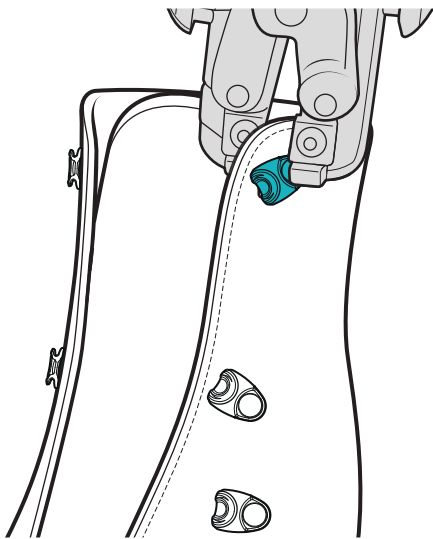


- 5 Perforar un orificio con la herramienta QuickFit™, que tiene una punta de 3 mm.

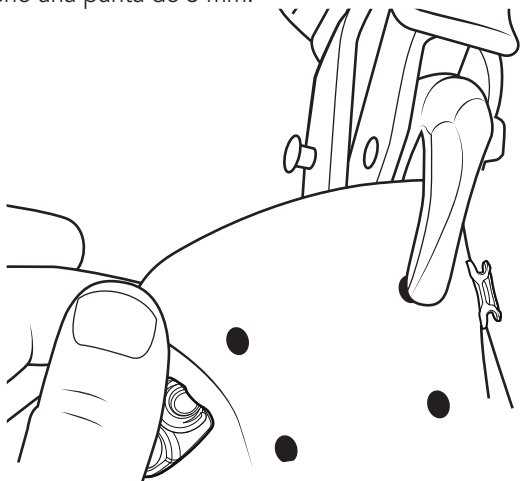


- 2 a) Fijar las guías QuickLace fijando el remache macho desde el interior del dispositivo a través de la guía QuickLace. b) Colocar la tapa del remache hembra en la parte superior de la guía QuickLace, sujetándola al zapato.

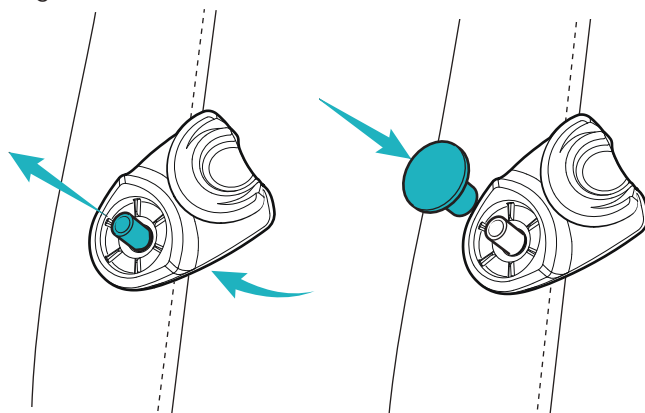


- 4 Determinar la ubicación del dial. Dejar 1 cm de espacio libre entre la parte superior de la lengüeta y la parte superior de la carcasa. Marcar la ubicación de los 4 orificios.

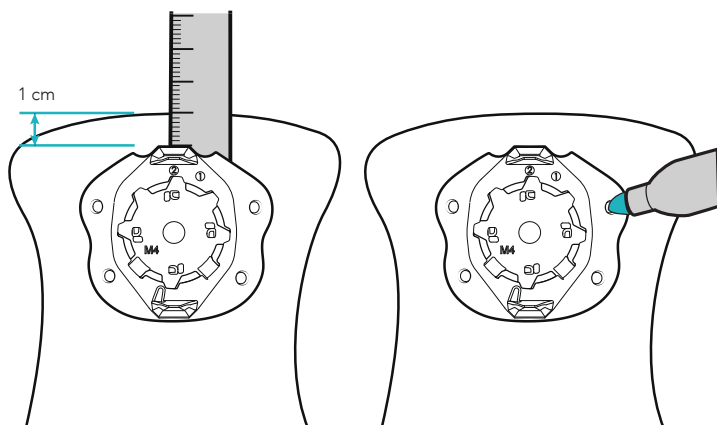


- 6 Fijar la carcasa del dial a la lengüeta. Colocar los remaches como se describe en el paso 2. Si se está satisfecho con la colocación, fijarlos con la herramienta QuickFit™.

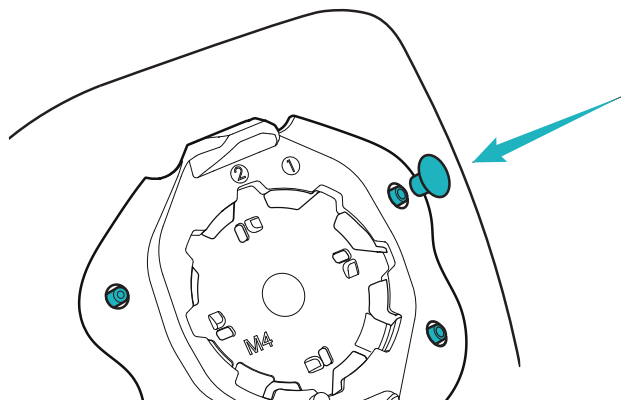


- 7 Encajar las guías como se muestra.

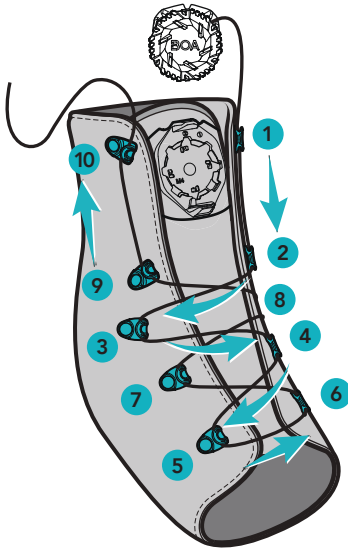

El cordón puede introducirse directamente a través de la guía (A) o tirarse para colocarlo en su lugar (B).

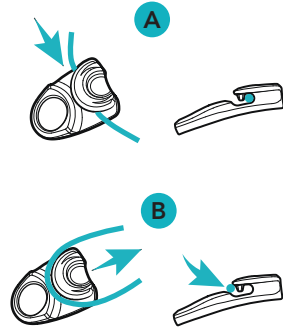


- 8 Retirar la holgura de los cruces de cordón y medir unos 15 cm de cordón desde la última guía hasta la parte posterior del dial. Marcar y recortar el cordón con un alicate.

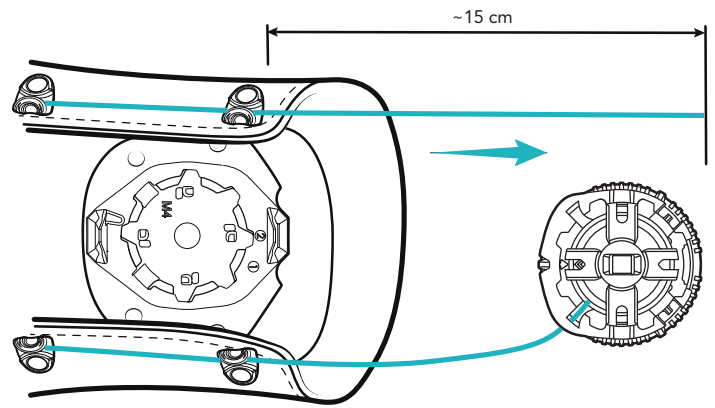


- 9 Introducir el extremo libre del cordón en el orificio abierto, sobre la brida de plástico, no por debajo. Luego, empujar el cordón a través del dial hasta que salga por la parte inferior.


Asegurarse de que las flechas estén alineadas. De lo contrario, girar el dial mientras sujeta la base hasta que las flechas se alineen.

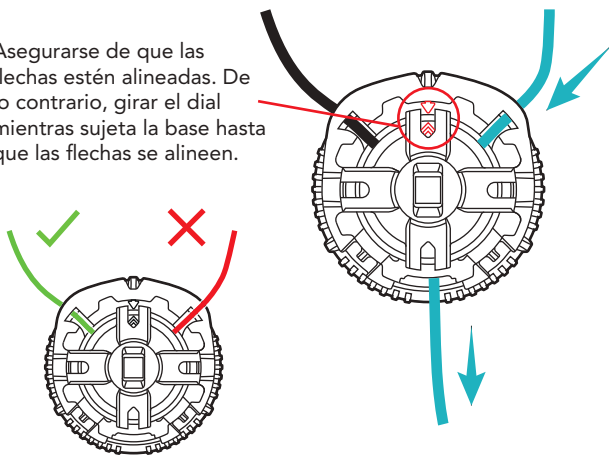

- 10 Enhebrar el cierre de cordón como se muestra a continuación (A) y dejar unos 5 mm de extremo libre. Apretar el nudo, dejando un extremo libre de 5 mm (B). Romper el cierre de cordón circular doble de la base (C) y tirar del nudo hacia el cuerpo del dial con un tirón firme (D).

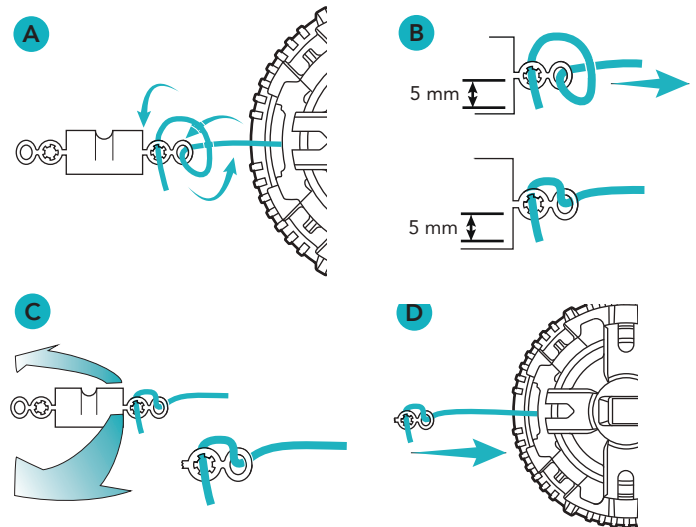

- 11 Alinear la muesca de la base del dial con el número "1" de la carcasa del dial e introducir el dial en la carcasa. Girar el dial en sentido antihorario hasta que la muesca muestre el número "2" del collar.

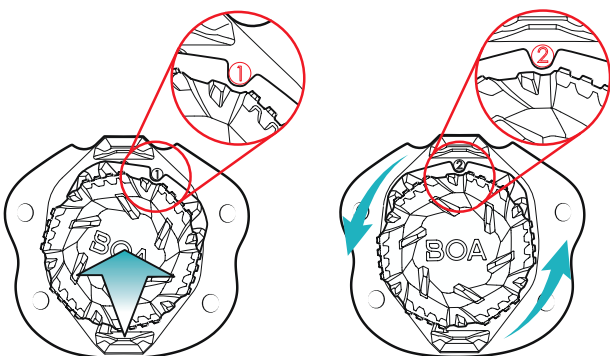

- 12 Probar el funcionamiento del sistema. Girar el dial en sentido horario para tensar el cordón y tirar de él para liberar la tensión. El cordón se puede soltar de la guía para ponérselo o quitárselo rápidamente.

