



CLICK
MEDICAL

クイックフィットレーサー

QFL-130-B-2 & QFL-130-W-2


2026年7月改訂

詳細については、
clickmedical.co/knowledge-base
をご覧ください。


クイックフィットレーサーキットの内容:



BOA® L6 ダイアル
(1mのレース付き、2個)

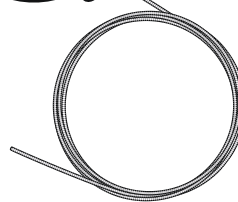

リベット
(ポストとキャップ32個)

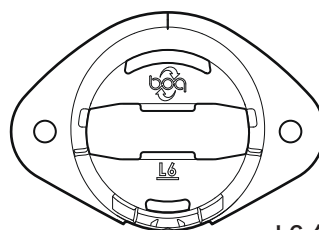

L6 ダイアルハウジング(2個)



クイックレースガイド(20個)

取り付けのヒント:

QuickFit™ツールの1/8インチポンチまたはその他の工具を使用して、必要な穴を開けてください。

クイックレースガイド用の既存の穴を使用する場合は、リベットを確実に固定するために、アイレットから金属またはプラスチック製のグロメットを取り外してください。

リベットはフィット確認のために手でカチッとはめ込むことができますが、リールでレースに大きな締め付け力をかける前にリベットを取り付けてください。

リベットをQuickFit™ツールまたはその他の方法で90度に曲げてください。斜めに押し込むとリベットの固定がうまくいきません。

推奨ツール:

- QuickFit™ツール
- マーカーペン
- ワイヤークッター



注意事項

必ず訓練を受けた専門家が装着してください。レースは摩耗します。少なくとも月に1回は点検してください。締めすぎると血行が悪くなる可能性があります。神経に問題のある患者には使用しないでください。レースを鋭利な角に近づけないでください。

他言語の注意事項はこちら:

clickmedical.co/advisories



保証:

www.clickmedical.co/terms/#warranty

米国のお客様

Click Medicalまで直接お問い合わせください
Help@ClickMedical.co ・ ヘルプライン: +1 970 670 7012


その他の国または地域のお客様:

お近くの販売店にお問い合わせください

装着前の準備:


装着を開始する前に、必要なQuickLaceガイドの数と、開口部の縁に沿った位置を決めてください。ガイドは均等間隔(通常は1つおき)で装着してください。(穴)。開口部の両側に同じ数のガイドを使用します。

既存のアイレット穴を使用するか、追加の穴をマークしてパンチで穴を開けます。

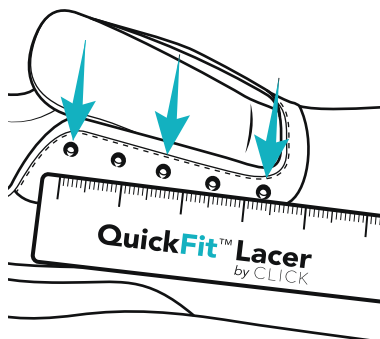


- 1 a) A. デバイス内部からオスリベットを差し込み、レースガイドに通してクイックレースガイドを取り付けます。

- b) メスリベットキャップをクイックレースガイドの上部にカチッとはめ込み、ガイドを靴に固定します。

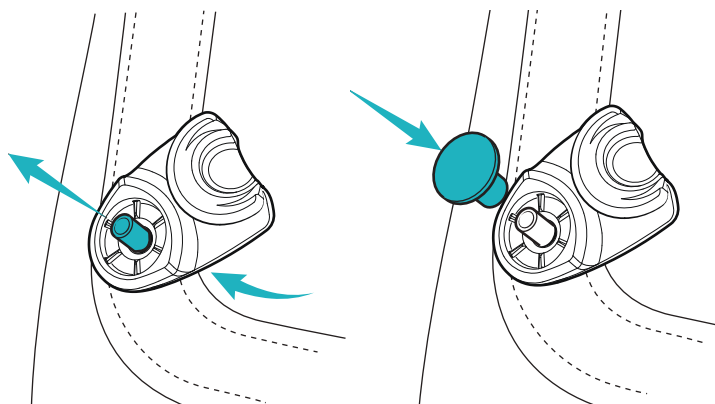


- 2 ガイドの位置が決まったら、セッティングツールでリベットを固定します。


すべてのガイドで繰り返します。

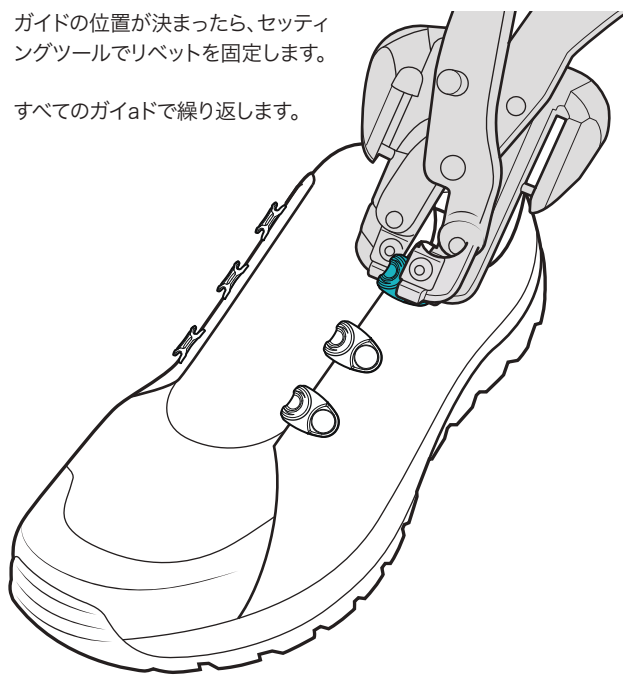


- 3 ダイヤルの位置を決めます。タンの上部とハウジングの上部の間に1cmの隙間を設けます。ハウジングのレース開口部をタンの上部に向けます。両方の穴の位置をマークします。

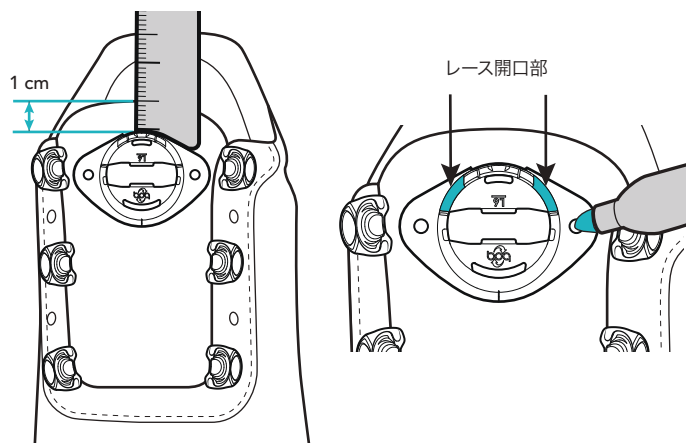


- 4 QuickFit™ツールの1/8インチパンチオプションを使用して穴を開けます

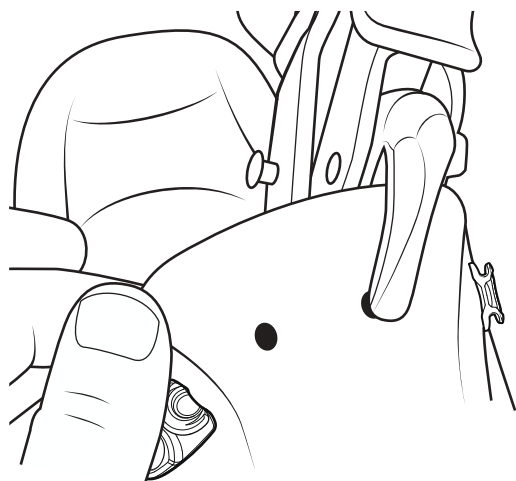


- 5 ダイヤルハウジングをタンに取り付けます。手順1の説明に従ってリベットをカチッとはめ込みます。配置に問題がなければ、QuickFit™ツールを使用して固定します。

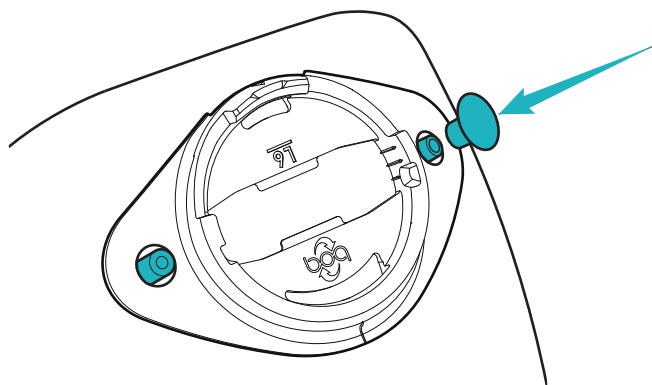


- 6** 図のようにガイドを紐で締めます。

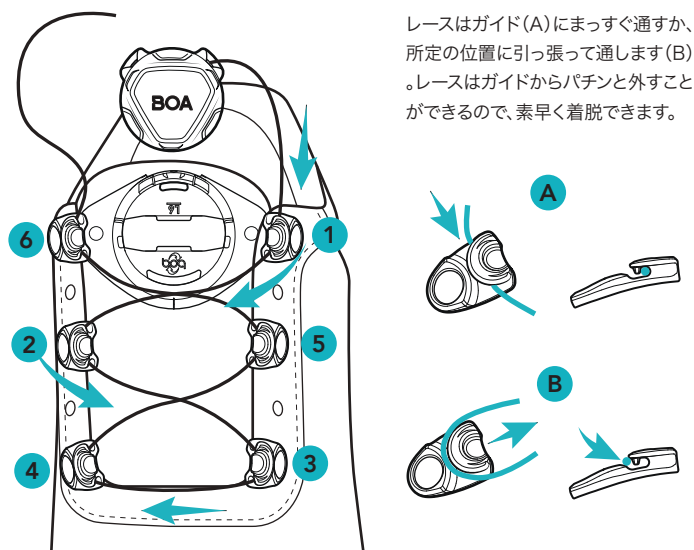


- 8** レースの先端を、プラスチックフランジの下ではなく、上部の開いたレースポートに通します。次に、矢印の位置で下部からレースが出るまで、ダイヤルにレースを通します。

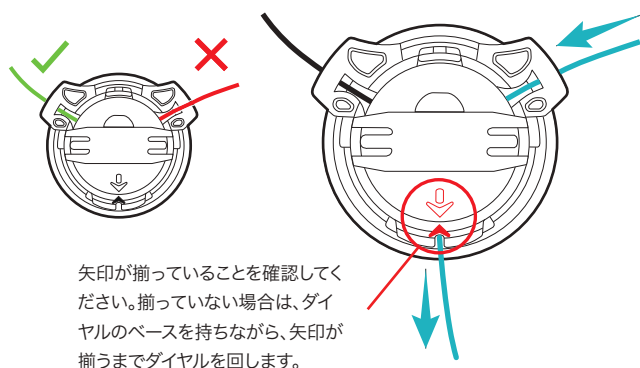


- 10** ダイアルの脚をカラーのスロットに挿入します。次に、ダイアルのレースエンドをカラーの上部にカチッとはめ込み、レースはダイアルハウジングの上部から出るようにします。

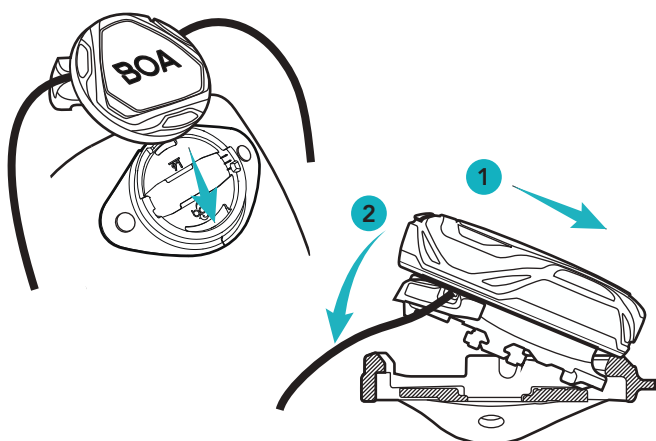

- 7** レースの交差部分のたるみを取り除き、最後のガイドからダイヤルの裏側まで約10cmのレースを測ります。ワイヤーカッターでレースをカットします。

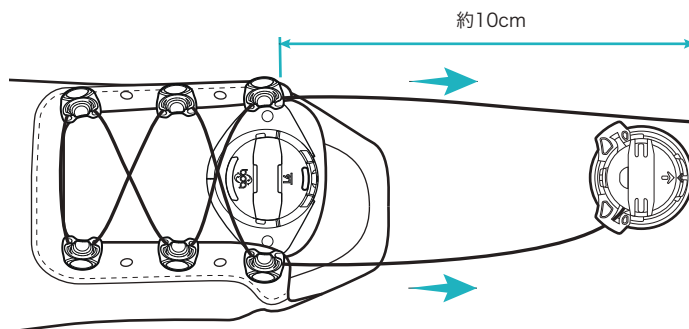

- 9 オーバーハンドノットを1つ作り、端を約5mmにカットします。次に、結び目をダイヤル本体にしっかりと引き込み、結び目をスプールに収めてレースの端を隠します。

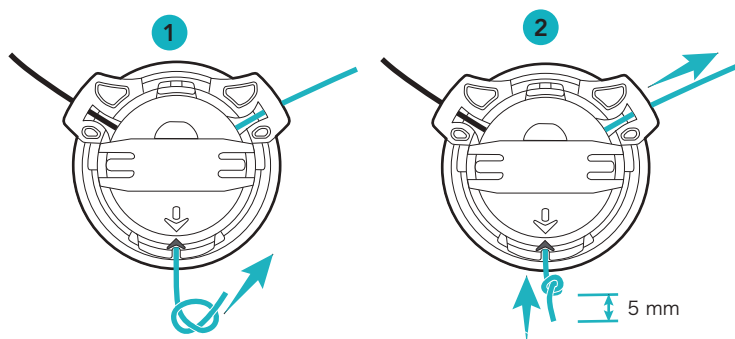

- 11** システムの動作をテストします。ダイヤルを時計回りに回すとレースが締め、ダイヤルを引き出すと張力が解放されます。レースはガイドから簡単に外せるため、素早く着脱できます。

