




RevoLock™ Lanyard

by CLICK

PK3000-220-05

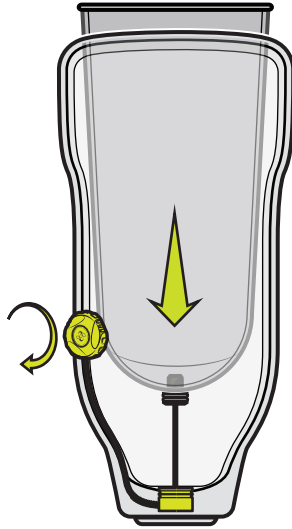


Need help? www.clickmedical.co/revolock

Revised 2019

Patent Pending

Contenido del kit

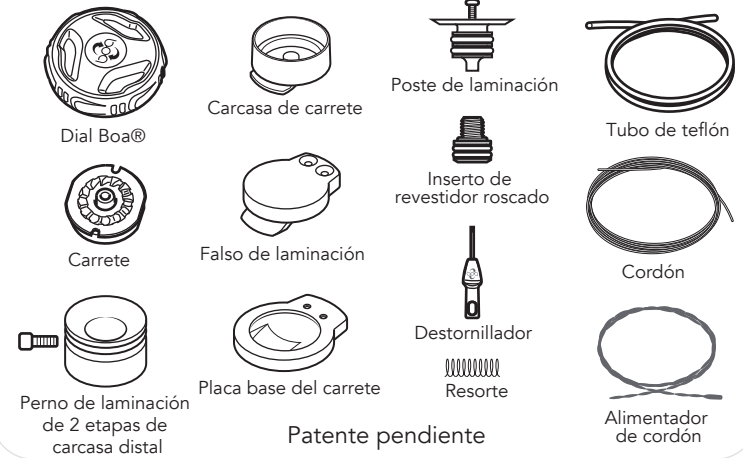

Patente pendiente

Advertencia



Debe ser instalado por un profesional capacitado en la fabricación de RevoLock™. El cordón se llevará puesto. Como mínimo, inspeccionar mensualmente y reemplazar cada 6 meses.

Puede perderse la suspensión si falla el cordón.

No usar en pacientes con problemas nerviosos.

Mantenga el cordón alejado de llamas y bordes afilados.

Asegure el inserto al revestidor antes de tensar el sistema.

Consulte las advertencias en otros idiomas @ www.clickmedical.co/advisories



WARRANTY:

www.clickmedical.co/terms/#warranty

U.S. Customers:

Contact Click Medical directly

Help@ClickMedical.co

Help Line: +1 970 670 7012

International Customers:

Please contact your local distributor




MDSS GmbH

Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Germany




Click Medical, LLC
1205 Hilltop Parkway, W101
Steamboat Springs, CO, 80487
USA
+1-970-670-7012


1 Aplique el poste adjunto al modelo.

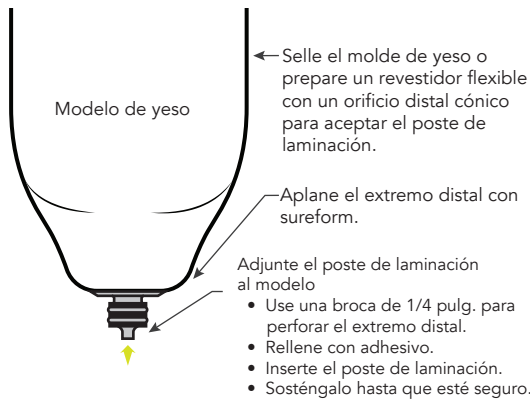

2 Aplique la bolsa de PVA.

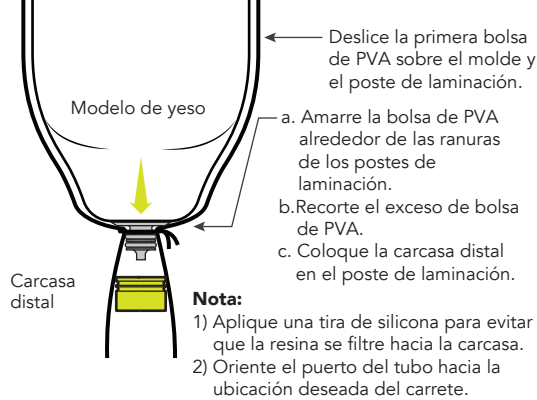

3 Colocación de materiales:

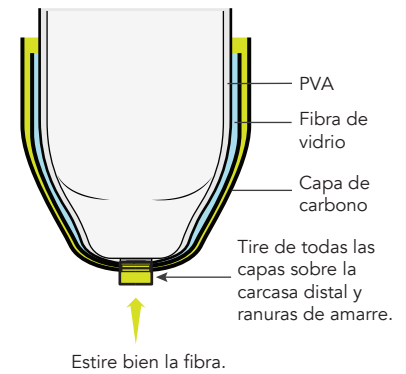


4 Instale el tubo

Laminación de una etapa


- 1) Inserte el tubo y el resorte.
- 2) Lamine con resina.

Laminación de 2 etapas


- 1) Instale el perno en la carcasa distal. Añadir arcilla a la cabeza del perno.
- 2) Lamine con resina.
- 3) Esmerile hacia abajo para exponer la cabeza del perno, luego extraiga el perno.
- 4) Inserte el tubo y el resorte en la carcasa distal.

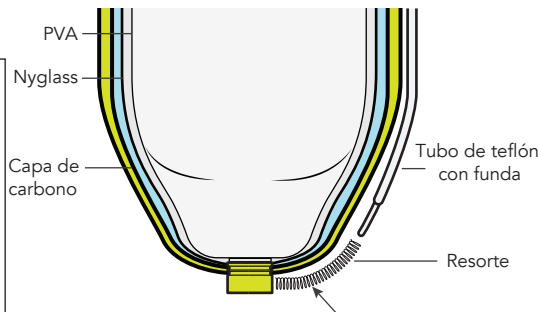


Insertar arcilla en el extremo del tubo.

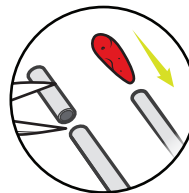

a. Conecte el resorte y el tubo a la carcasa distal.

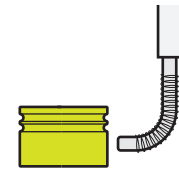

b. Deslice el tubo de teflón en la carcasa distal hasta que esté completamente asentado.

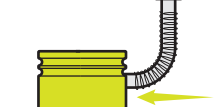


c. Deslice el resorte sobre el teflón y dentro de la carcasa distal para bloquear el tubo en su lugar.

Tenga cuidado de no doblar el tubo.


Empaque arcilla alrededor del tubo antes de la laminación.




5 Coloque el tubo a lo largo del lado del zócalo.

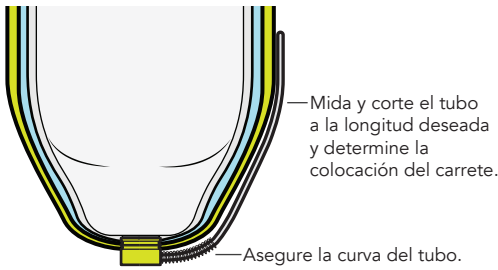


6 Coloque la carcasa del carrete y conecte el tubo.

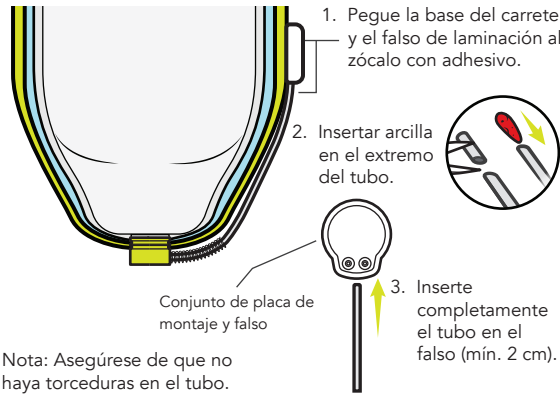


7 Lamine la capa exterior.

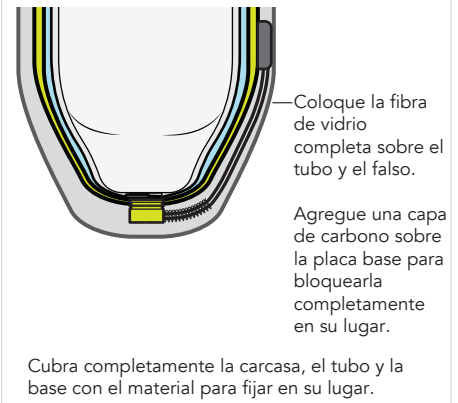


8 Después de laminar, esmerile hacia abajo para exponer el falso.

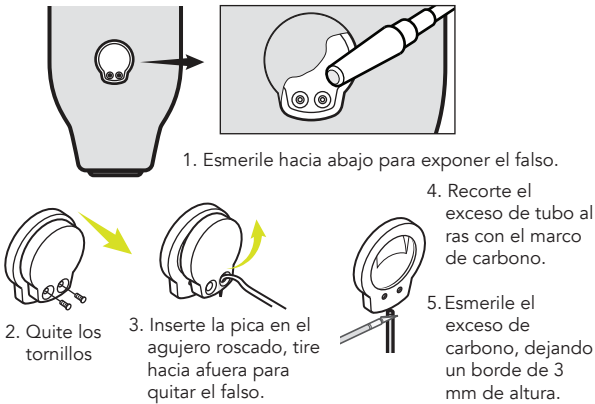


9 Retire el modelo y el poste de laminación.

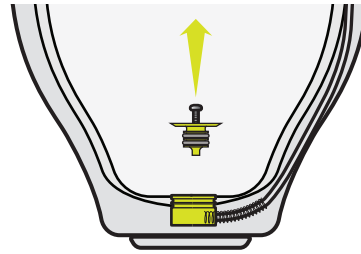


10 Inserte la carcasa del carrete.

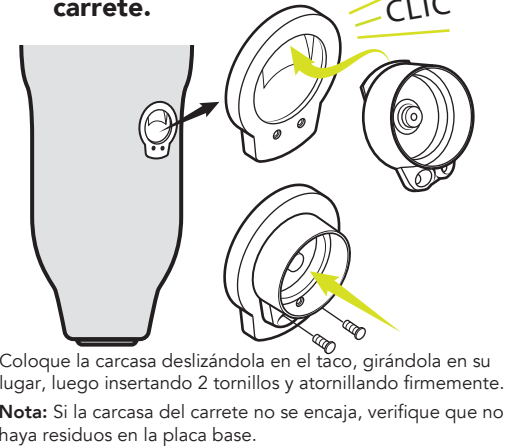


11 Coloque el cordón en el sistema.

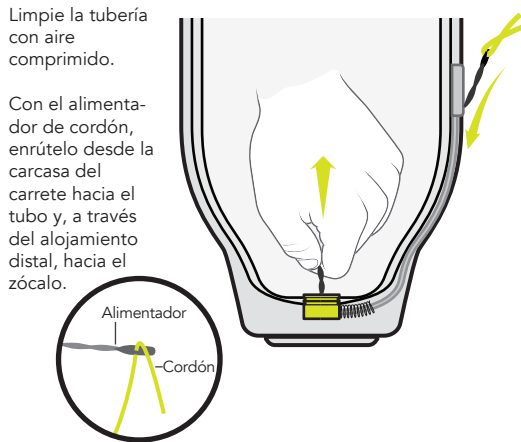

12 Fije el cordón al carrete.

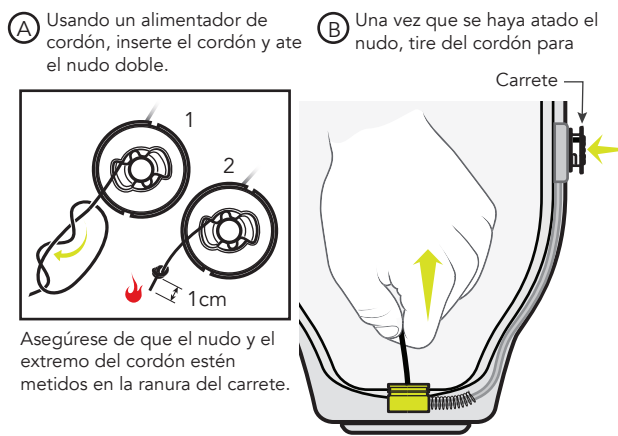


13 Adjunte el dial a la carcasa.

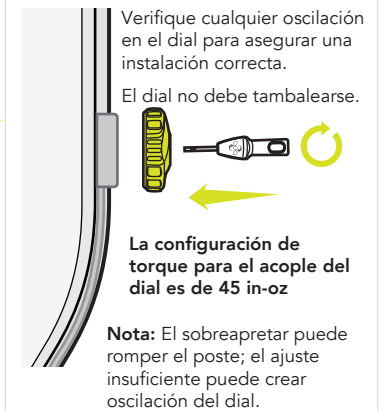

14 Determine la longitud del cordón.

Determine cuánto cordón se necesita para extender fuera del zócalo y adhiera al revestidor y al inserto roscado.

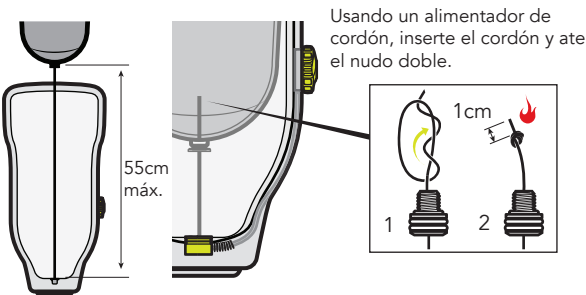

15 Pruebe el funcionamiento.

- Acople el inserto roscado al revestidor.
- Enrolle cordón.
- Tire del dial hacia afuera para liberarlo.
- Tire del vestidor y del cordón fuera del zócalo.
- Enrolle cordón de nuevo.

Nota:

Inspeccione el cordón de forma rutinaria para detectar signos de desgaste o fatiga.

Reemplace el cordón cada 6 meses.

Mantenga el cordón alejado de llamas.

¡Felicidades, ha terminado!

