

GARANTIE

Der Click Reel ist garantiert für die Lebensdauer des Geräts, in das er ursprünglich eingebaut wurde. Die Registrierung des Click Reel ist zum Zeitpunkt der Auslieferung des Geräts erforderlich. Zum Registrieren: <https://clickmedical.co/contact-us/cr-registration/>

GARANTIE

Für Garantieinformationen zu allen Produkten von Click Medical: <https://clickmedical.co/terms/#warranty>

U.S. Kunden:

Kontakt Help@ClickMedical.co
 Tel: +1-970-670-7012

Internationale Kunden:


Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler. Siehe Anleitungen in anderen Sprachen: clickmedical.co/instructions

Materialvorschläge und Richtlinien finden Sie auf die **Materialdatenblatt**: clickmedical.co/mds

Die Produkte von Click Medical sind patentrechtlich geschützt. Vollständige Liste siehe www.clickmedical.co/patents


Click Reel Greiferset Inhalt:

Andere benötigte Materialien (nicht mitgeliefert):

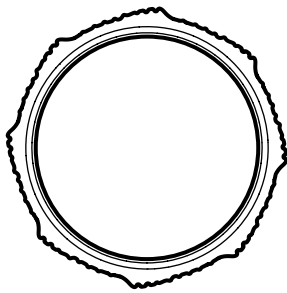

Komfort-Griff x5
AC-100-05

- ODER -

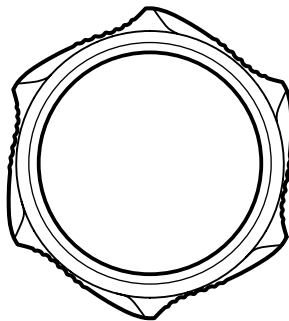

Kraftgriff x5
AC-101-05



Bürste




Sekundenkleber




Oberflächenreiniger
Isopropylalkohol
oder Ähnliches

Vorbereitung der Oberfläche:

- 1 Reinigen Sie die gesamte Oberfläche des Ziffernblatts mit Isopropylalkohol (grau unterlegt).

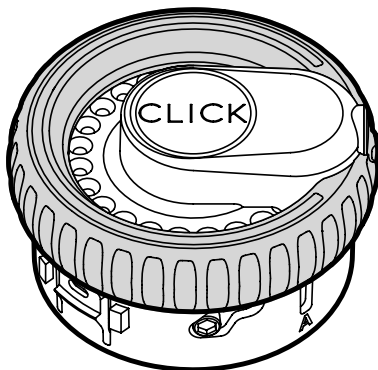


- 2 Reinigen Sie die gesamte Innenfläche des Griffs mit Isopropylalkohol (grau unterlegt).

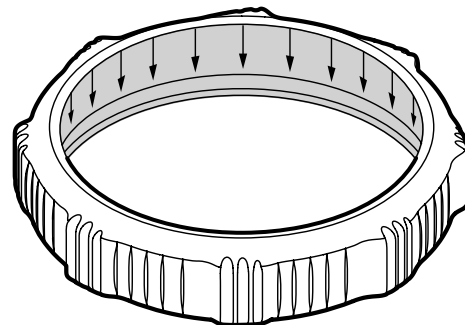

Kleber Anwendung:


3 Kleber Anwendung:

1. Mit dem Pinsel Klebstoff auf die Innenfläche des Griiffs auftragen.
2. Klebstoff mit dem Pinsel auf den Griff des Zifferblatts auftragen.

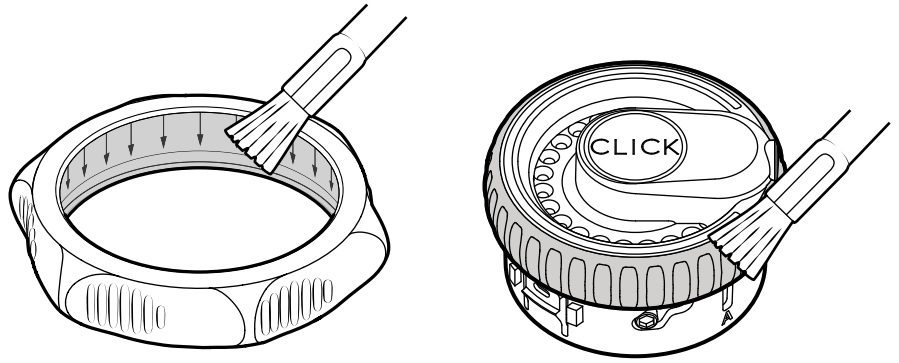


Griffbefestigung:


- 4 Identifizieren Sie die Unterseite des Griiffs. Auf der Innenseite des Griiffs befinden sich Pfeile, die die Unterseite anzeigen.

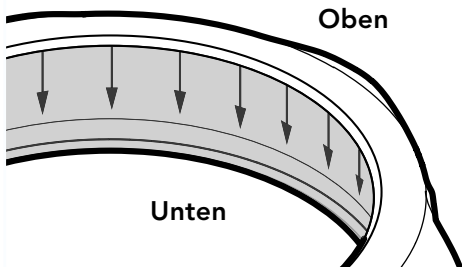


- 5 Vergewissern Sie sich, dass der Griff richtig ausgerichtet ist, damit die Fingerauflagen mit der Anzugsrichtung übereinstimmen.

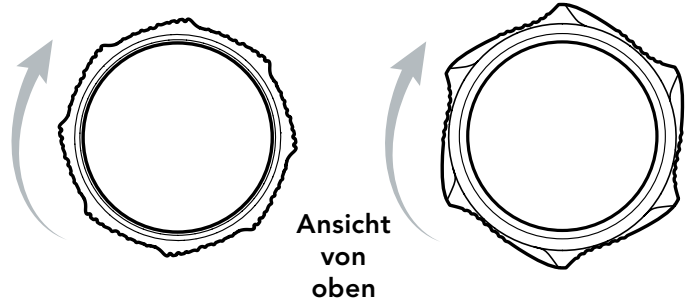

- 6 Schieben Sie den Griff über das Zifferblatt, solange der Klebstoff noch feucht ist.

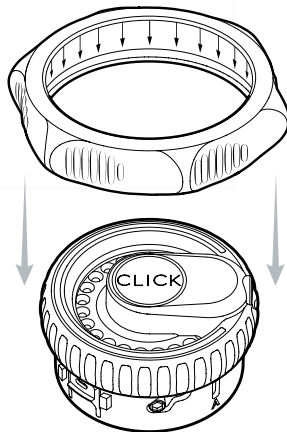

Profi-Tipp: Für ein optimales Aussehen richten Sie ein Set Lappen am Griff an der Mittellinie der Monospeiche aus.

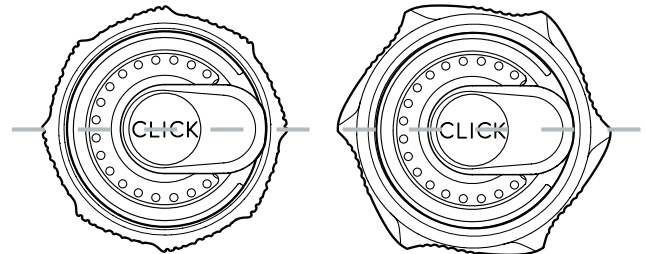

Fertigstellung:

- 7 Lassen Sie dem Klebstoff ausreichend Zeit zum Trocknen.



- 8 Prüfen Sie nach dem Trocknen des Klebstoffs, ob der Griff fest mit dem Zifferblatt verbunden ist.

- 9 Entfernen Sie überschüssigen Klebstoff vom Zifferblatt.

UK REP MDSS-UK RP LIMITED, 6 Wilmslow Road
Rusholme, M14 5TP Manchester
Vereinigtes Königreich

CH REP MDSS CH GmbH, Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Schweiz

MD MDSS GmbH, Schiffgraben 41
30175 Hannover, Deutschland

EC REP 



Click Medical, LLC, 1205 Hilltop Parkway, W101
Steamboat Springs, CO 80487, USA +1-970-670-7012