

GARANTÍA

La manija Click Reel durará toda la vida útil del dispositivo en el que se instale originalmente. Es necesario registrar el Click Reel en el momento de la entrega del dispositivo original.

registrar visite: <https://clickmedical.co/contact-us/cr-registration/>

GARANTÍA

Para obtener información sobre la garantía de todos los productos de Click Medical: <https://clickmedical.co/terms/#warranty>

Clientes en EE.UU:

Contacto Help@ClickMedical.co

Tel: +1-970-670-7012

Clientes internacionales:

Por favor póngase en contacto con su distribuidor local.

Ver instrucciones en otros idiomas: clickmedical.co/instructions

Para sugerencias y directrices sobre el material, consulte a la


Hoja de datos del material: clickmedical.co/mds

Los productos de Click Medical están protegidos por patente.

Para consultar la lista completa www.clickmedical.co/patents


Kit Click Reel Grip Contenido:

Otros materiales necesarios (no suministrados):

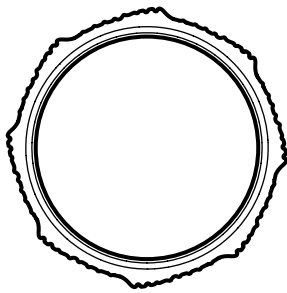

Agarre confortable
x5 AC-100-05

- 0 -

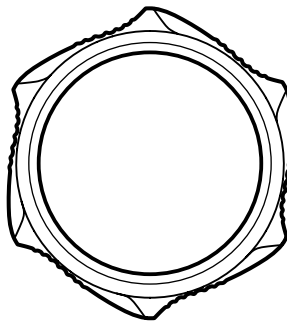

Power Grip x5
AC-101-05



Cepillo




Pegamento
Instantáneo




Limpiador de
superficies Alcohol
isopropílico o
similar

Preparación de la superficie:

- 1 Limpie toda la superficie de la esfera con alcohol isopropílico (resaltado en gris).

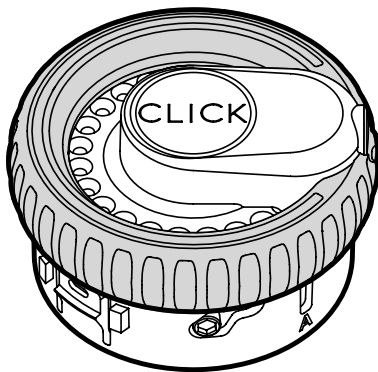


- 2 Limpie toda la superficie interior de la agarradera con alcohol isopropílico (resaltado en gris).

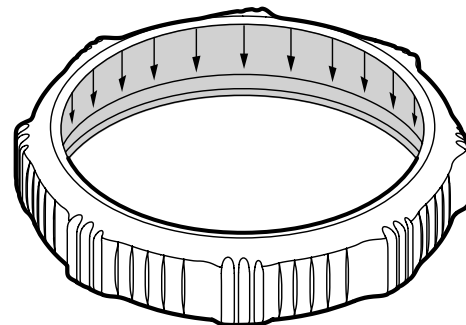

Aplicación adhesiva:


3 Aplicación adhesiva:

1. Con el pincel, aplique adhesivo a la superficie interior de la agarradera.
2. Aplique adhesivo a la agarradera de la esfera con el pincel.

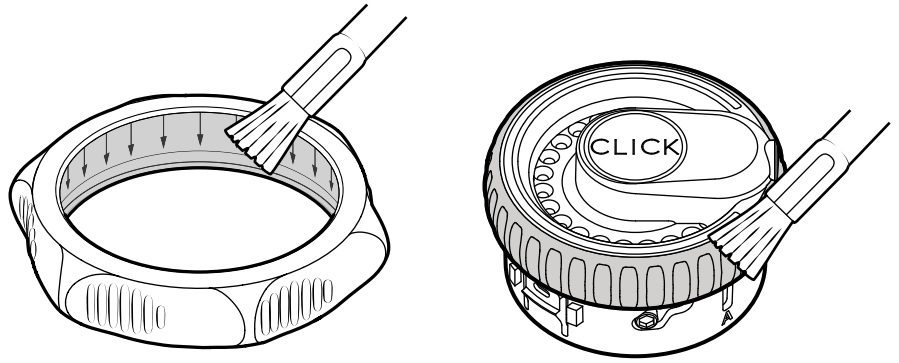


Fijación de la agarradera:


4. Identifique la parte inferior de la agarradera. En la superficie interior de la agarradera hay flechas que indican la parte inferior.

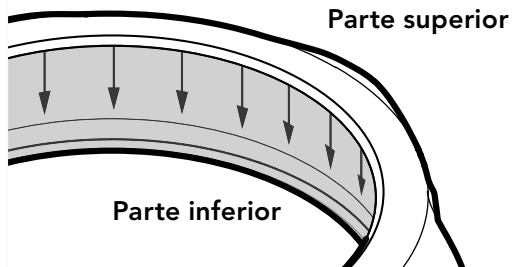


5. Asegúrese que la agarradera está orientada correctamente para que las almohadillas de los dedos estén alineadas con la dirección de apriete.

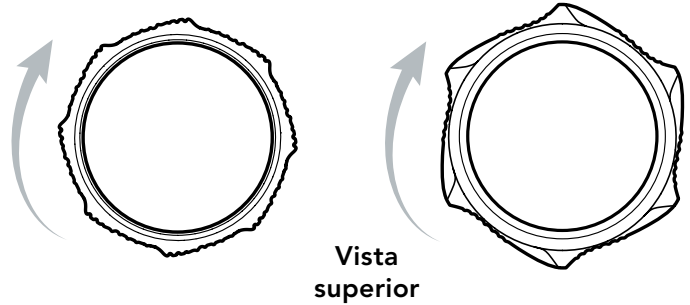

6. Deslice la agarradera sobre la esfera mientras el adhesivo aún está húmedo.

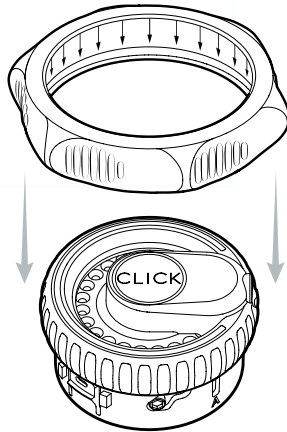

Consejo profesional: Para una mejor apariencia, alinee 1 juego de lóbulos en la agarradera con la línea central del monospoke.

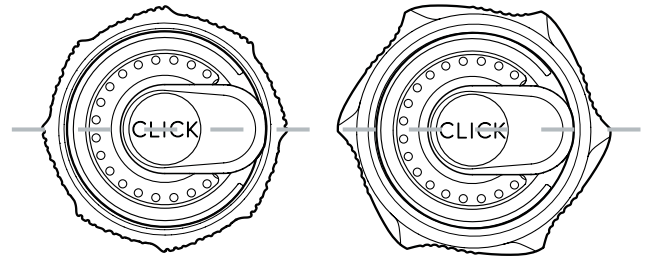

Finalización:

7. Deje secar el adhesivo el tiempo necesario.



8. Una vez seco el adhesivo, compruebe que la agarradera está firmemente sujeta a la esfera.

9. Limpie el exceso de adhesivo de la esfera.

UK REP MDSS-UK RP LIMITED, 6 Wilmslow Road
Rusholme, M14 5TP Manchester
United Kingdom

CH REP MDSS CH GmbH, Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

MD MDSS GmbH, Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

EC REP 



Click Medical, LLC, 1205 Hilltop Parkway, W101
Steamboat Springs, CO 80487, USA +1-970-670-7012