




RevoLock®

V2 & V3BOA® Dial und HC Lace Kit Port A

RP-310A

Überarbeitetes Datum März 2025

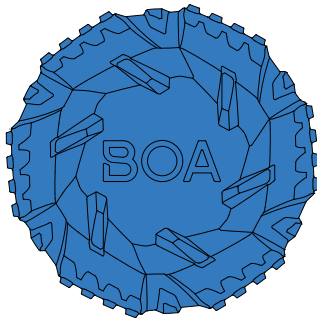

GARANTIE:

Informationen zur Garantie für alle Produkte von Click Medical finden Sie unter:
<https://clickmedical.co/terms/#warranty>

U.S. Kunden :

Kontaktieren Sie Help@ClickMedical.co
Telefon: +1-970-670-7012

Internationale Kunden:

Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Händler

Die Produkte von Click Medical sind patentrechtlich geschützt. Für eine vollständige Liste siehe www.clickmedical.co/patents

Revised 2023



Hinweis

Muss von einem in der Herstellung von RevoLock geschulten Fachmann angebracht werden.

Faden wird sich abnutzen. Prüfen Sie sie mindestens monatlich und ersetzen Sie sie alle 6 Monate.

Wenn der Faden reißt, kann es zum Verlust der Aufhängung kommen. Verwenden Sie es nicht bei Patienten mit Nervenproblemen.


Halten Sie die Fäden von offenen Flammen und scharfen Kanten fern. Befestigen Sie die Einlage vor dem Spannen des Systems am Liner.

Siehe Hinweise in anderen Sprachen: clickmedical.co/advisories

RevoLock® V2 & V3 BOA Einstellrad und HC Faden Kit Port A Inhalt:



BOA® Lanyard V2 Einstellrad

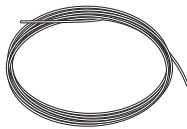

Faden



Fadenvorschub

Ein Schulungsvideo über die Klickverstellbarkeit und den Betrieb von RevoLock finden Sie unter www.clickacademy.co



UK REP

MDSS-UK RP LIMITED, 6 Wilmslow Road
Rusholme, M14 5TP Manchester
Großbritannien

CH REP

MDSS CH GmbH, Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Schweiz

MD

MDSS GmbH, Schiffgraben 41
30175 Hannover, Deutschland


EC REP



Click Medical, LLC, 1205 Hilltop Parkway, W101
Steamboat Springs, CO 80487, USA +1-970-670-7012


1 Entfernen Sie das Einstellrad

- Suchen Sie den Metalleinsatz.
- Führen Sie einen kleinen Schlitzschraubendreher zwischen dem Metalleinsatz und dem Einstellrad ein.
- Heben Sie die Spule vorsichtig nach oben

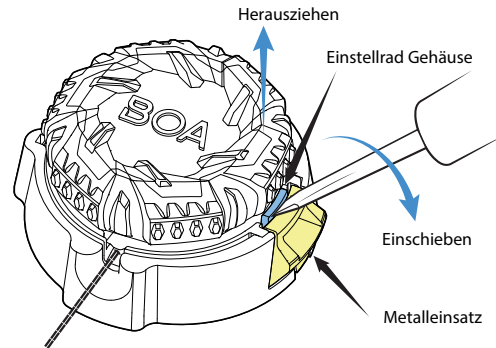


2 . Entfernen Sie die Schnur.


- Stellen Sie sicher, dass das Einstellradgehäuse offen ist, indem Sie es nach oben ziehen.

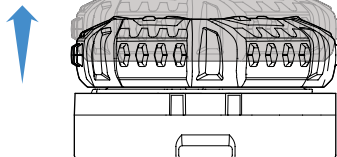

- Ziehen Sie die gesamte Schnur aus dem Einstellrad heraus.

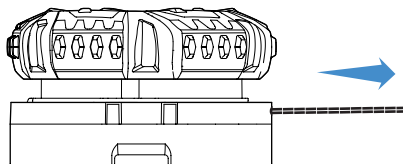


- Lokalisieren Sie die große Öffnung für den Austritt des Fadens im Einstellrad. Haken Sie die Schlaufe des Fadens im Einstellrad mit einem Zahnstocher ein und ziehen Sie den Faden aus dem Einstellrad.

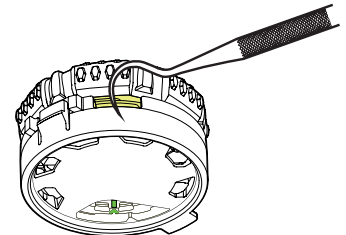


- Schneiden Sie den Faden ab und ziehen Sie ihn aus dem Einstellrad. des Einstellrades. Entfernen Sie dann den Faden aus dem Gerät..

Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Ersatzspule verwenden, indem Sie das C auf der Unterseite des Einstellrads erkennen.

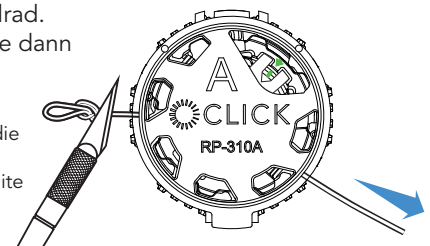

3 Faden einfädeln.



Führen Sie den Faden mit Hilfe des Fadenziehers vom Einstellrad in den Schlauch und dann durch das distale Gehäuse in den Schaft.

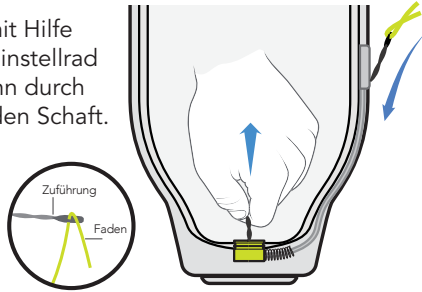


4 Verschnüren Sie das Einstellrad.

a) Bereiten Sie das Einstellrad zum Verschnüren vor.


1. Vergewissern Sie sich, dass das Einstellrad eingerastet ist, indem Sie es herunterdrücken
2. Drehen Sie das Einstellrad um und vergewissern Sie sich, dass die grüne Markierung auf den grünen Pfeil ausgerichtet ist. Falls nicht, halten Sie die Basis fest und drehen Sie das Einstellrad, bis die Markierungen übereinstimmen

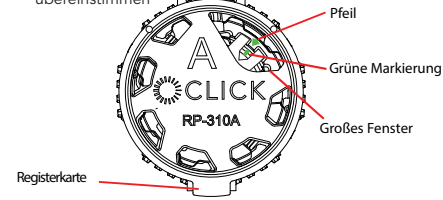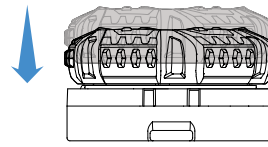

b) Lokalisieren Sie die Öffnungen für die Schnürung.

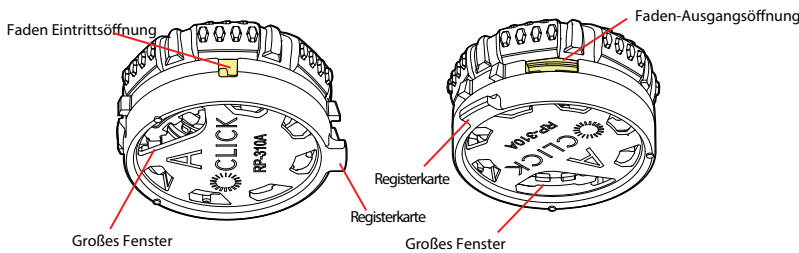


c) Führen Sie den Faden durch die Eintrittsöffnung und aus der Austrittsöffnung auf der gegenüberliegenden Seite des Einstellrads.

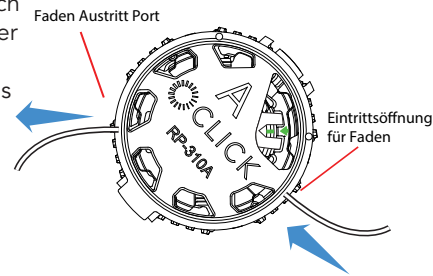


d) Binden Sie den Faden mit einem Überhandknoten.

1. Machen Sie eine Schlaufe.
2. Knüpfen Sie einen Überhandknoten mit der Schlaufe.p.
3. Ziehen Sie den Knoten fest. Die Schlaufe des Knotens sollte etwa 1 cm lang sein.
4. Schneiden Sie das Ende ab.

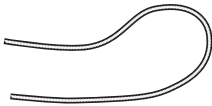


e) Ziehen Sie die Schlaufe in das Einstellrad, um den Knoten zu fixieren.


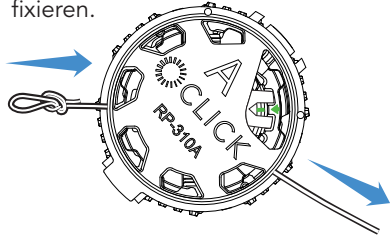


5 Bringen Sie das Einstellrad an.

a) Stecken Sie den Fuß des Einstellrads in den Kragen

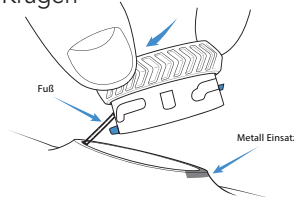


b) Drücken Sie die Spule fest in den Kragen (Sie sollten ein "Klick" hören, wenn sie fest sitzt).

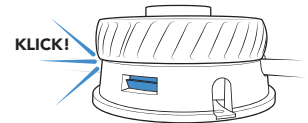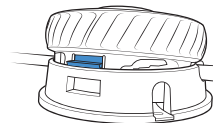


6 Bestimmen Sie die Länge des Fadens.

Bestimmen Sie, wie viel Faden benötigt wird, um über den Schaft hinauszugehen und am Innenfutter und am Gewindeeinsatz befestigt zu werden.

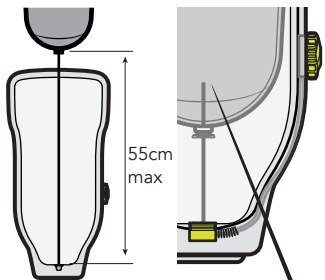

Führen Sie den Faden mit Hilfe eines Fadenziehers ein und machen Sie einen doppelten Überhandknoten.

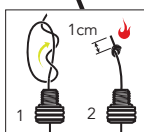


Hinweis: Die maximale Länge des Fadens darf 55 cm nicht überschreiten.

7 Testen Sie die Funktion.

- Befestigen Sie den Gewindeeinsatz an der Einlage.
- Wickeln Sie den Faden auf
- Ziehen Sie den Einsatz und den Faden aus der Fassung.
- Wickeln Sie den Faden wieder auf.

Hinweise:

- Überprüfen Sie den Faden regelmäßig auf Anzeichen von Ausfransungen oder Ermüdung.
- Ersetzen Sie den Faden alle 6 Monate.
- Halten Sie die Fäden von offenen Flammen fern.

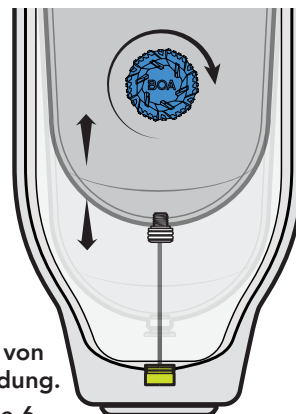

✓ Herzlichen Glückwunsch! Sie sind fertig!

