

¡Felicidades por su nuevo dispositivo!

Por favor, familiarícese con el uso del dial Click® y con el cuidado y mantenimiento de su sistema.

Además, si está utilizando RevoLock® o RevoFit®, consulte cómo utilizar el deslizador. En el caso de RevoLock®, consulte cómo utilizar el broche de conexión rápida.




El carrete Click® puede funcionar en 2 modos diferentes.
Consulte con su médico cuál de estos dos modos le corresponde.

Modo Potencia


MICRO AJUSTABLE

DISEÑOS AJUSTABLES CON
 menos de 3" de cordón


75% de aplicaciones

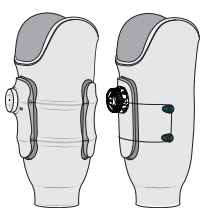

1-3 paneles

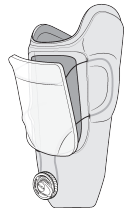

Diseños de bisagra

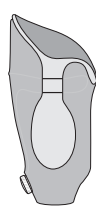

Aberturas de menos de 3" de ancho

Modo de cambio


MACRO Y MICRO AJUSTABLES

DISEÑOS AJUSTABLES CON
 más de 3" de cordón


25% de aplicaciones



Suspensión RevoLock®

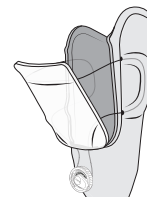

Grandes aberturas

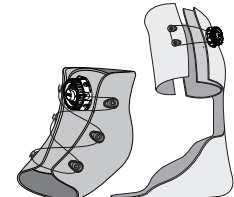


Ortesis de apertura total y bi-válvula

Cómo utilizar el dial Click

Cómo utilizar el dial Click en **modo potencia**

- 1 Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para aplicar la tensión deseada.
- 2 Gire el dial en sentido antihorario para liberar la tensión.
- 3 Realice los microajustes necesarios.

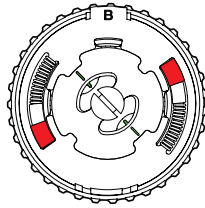

Si el dial siempre hace clic al girarlo, está en modo potencia

Cómo utilizar el dial clic en el **modo de cambio**


- 1 Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para recoger el cordón rápidamente.
- 2 A medida que gire el dial, la tensión del cordón aumentará y el dial empezará a cambiar automáticamente de "silencioso" a "hacer clic".
- 3 Realice un microajuste girando hacia delante o hacia atrás (modo potencia).
- 4 Para liberar completamente el cordón, gire hacia la izquierda hasta que deje de hacer "clic". El cordón se soltará libremente del dial.



El dial funcionará de forma silenciosa mientras recoge el cordón.



Cuando el dial empiece a hacer clic, continúe girándolo hasta alcanzar la tensión deseada del cordón.

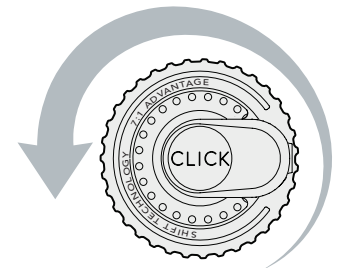

Realice inspecciones frecuentes de su sistema.



Inspeccione el cordón:

- ✓ Verifique con regularidad si hay desgaste o daños.
- ✓ Sustitúyalo ante cualquier signo de desgaste
- ✓ Sustituya el cordón cada 6 meses




Este producto es impermeable y sumergible. Aclare con agua dulce después de usarlo en agua salada, arena o barro

El deslizador para usuarios de los kits RevoLock® y RevoFit®

El deslizador se utiliza para mantener el dial funcionando en el modo potencia (microajustable) y no permitirá la liberación total del cordón (macroajustable) hasta que el usuario desconecte el deslizador.


Cómo utilizar el deslizador:

- 1 El deslizador se desbloquea al empujarlo **hacia afuera**.
 - Permite el funcionamiento estándar del dial con la liberación total del cordón

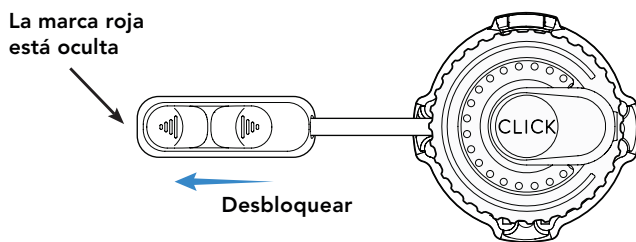

Tip profesional: Una vez que el dial haya cambiado al modo potencia, al accionar el deslizador se podrán realizar microajustes en ambas direcciones, pero no se liberará completamente el cordón hasta que el usuario desconecte el deslizador.

- 2
 - Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la tensión del cordón hasta que cambie al modo potencia (con un clic) y haya alcanzado la tensión deseada.
 - Mientras el dial está completamente desplazado, enganche el deslizador empujándolo hacia el dial, hasta que aparezca la marca roja.
 - Una vez acoplado, el dial se microajustará en ambas direcciones, clic a clic, pero no permitirá la liberación completa del cordón hasta que el usuario desconecte el deslizador.

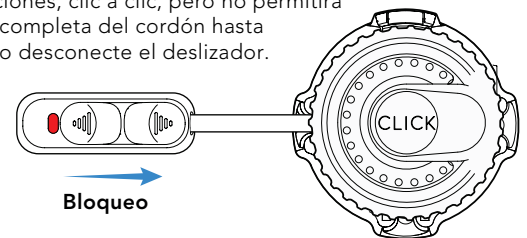

Tip profesional: Una mayor tensión del cordón acelerará el desplazamiento del dial. Esto se puede lograr tirando del cordón mientras se gira el dial (simultáneamente).

Para Usuarios del Kit RevoLock® con conector de broche de presión

Cómo accionar el broche para conectar el forro:

