

Congratulazioni per il tuo nuovo dispositivo!

Ti invitiamo a consultare le modalità di utilizzo della Ghiera Click® e di manutenzione del sistema

Inoltre, se utilizzi RevoLock® o RevoFit®, ti invitiamo a leggere come utilizzare lo Slider. Per il sistema RevoLock®, leggi come utilizzare il Sistema di Aggancio Rapido.




La Bobina Click® può funzionare in 2 modalità diverse
Parla con il tuo medico curante per sapere qual è la tua Modalità.

Modalità Power

MICROREGOLABILE

MODELLI REGOLABILI CON
 Meno di 3" di attacco del laccio

75% delle Applicazioni

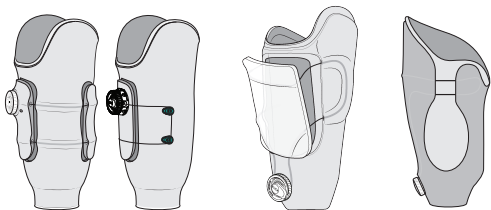

1-3 Pannelli

Design a Cerniera


Interstizi Larghi
 Meno di 3"

Modalità Shift

MACRO E MICRO REGOLABILE

DESIGN REGOLABILI CON
 Più di 3" di attacco del laccio

25% delle Applicazioni

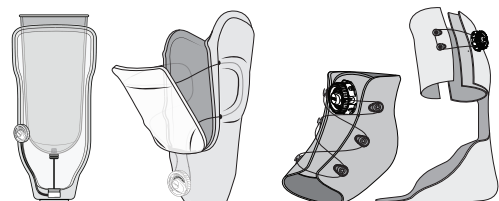

Sospensione RevoLock


Grandi Interstizi e Porte

Ortesi Completamente Apribili e Bi-Valvole

Come utilizzare la ghiera Click

Come utilizzare la ghiera Click in **modalità Power**

- 1 Ruotare la ghiera in senso orario per stringere alla tensione desiderata
- 2 Ruotare la ghiera in senso antiorario per allentare la tensione.
- 3 Effettuare eventuali microregolazioni.

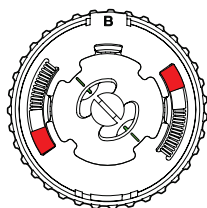

Se la ghiera scatta sempre quando viene ruotata, è in modalità Power.

Come utilizzare la ghiera a scatto in **modalità Shift**


- 1 Ruotare la ghiera in senso orario per prendere rapidamente il laccio
- 2 Ruotando la ghiera, la tensione del laccio aumenta e la ghiera passa automaticamente da "silenzioso" a "scatto".
- 3 Apportare microregolazioni ruotando in avanti o all'indietro (Modalità Power).
- 4 Per sganciare completamente il laccio, ruotare in senso antiorario fino a quando non si interrompe il "clic". Il laccio si staccherà completamente dal quadrante.



La ghiera funziona in modo silenzioso durante la raccolta del laccio.



Quando la ghiera inizia a scattare, continuare a girare finché non si raggiunge la tensione del laccio desiderata.

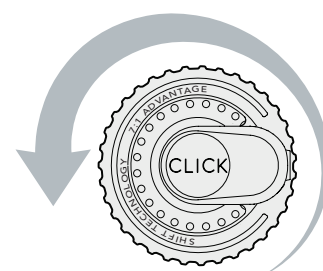

Ispezionare regolarmente il sistema.



Ispezionare il laccio:

- ✓ Controllare periodicamente che non vi siano segni di usura o danni
- ✓ Sostituire in caso di segni di usura
- ✓ Sostituire il laccio ogni 6 mesi



Questo prodotto è impermeabile e immergibile. Sciacquare con acqua dolce se usato in acqua salata, sabbia o fango.

Lo Slider Per gli Utilizzatori del Kit RevoLock® e RevoFit®


Lo Slider serve a mantenere la ghiera in modalità Power (microregolabile) e non permette lo sblocco completo del pizzo (macroregolabile) finché l'utente non lo sgancia.

unlocked

Come usare lo Slider:


- 1 Spingendo verso l'esterno, lo **Slider si sblocca**.
 - Consente il funzionamento standard della ghiera con lo sgancio completo del laccio.

Il Segno Rosso è Nascosto

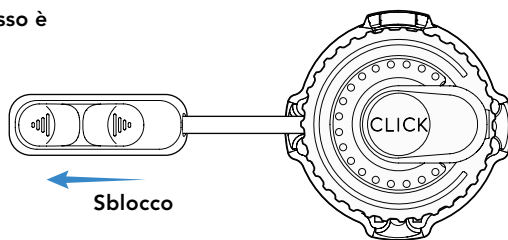

Consiglio: Una volta che il quadrante si è spostato in Modalità Power, attivando lo Slider sarà possibile effettuare microregolazioni in entrambe le direzioni, ma il laccio non si sgancerà completamente fino a quando l'utente non disattiverà lo Slider.

- 2
 - Girare la ghiera in senso orario per aumentare la tensione del laccio fino a quando non si sposta in modalità Power(click) e si è raggiunta la tensione desiderata
 - Quando la ghiera è completamente spostata, agganciare lo Slider spingendo verso la ghiera, finché non appare il segno rosso.
 - Una volta inserito, la ghiera si microregola in entrambe le direzioni, clic dopo clic, ma non consente lo sgancio completo del laccio fino a quando l'utente non sblocca lo Slider.

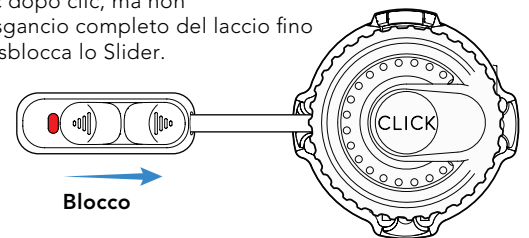

Consiglio: Una maggiore tensione del laccio farà sì che la ghiera si sposti più velocemente. È possibile ottenere questo risultato tirando il laccio mentre si gira la ghiera (in contemporanea).

Per gli Utilizzatori del Kit RevoLock® con Connettore Snap

Come utilizzare lo Snap per collegare la fodera:

